

Gebruiksaanwijzing Hable Easy (met Voiceover aan)

Zorg dat iPhone en Hable gekoppeld zijn.

Verschillende configuraties Hable Easy

1. **Naar Hable Easy - Horizontale Modus.** Om de horizontale modus te activeren houd je eerst puntjes 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tegelijk ingedrukt, je voelt nu vier trillingen - hierna kun je de 6 puntjes loslaten. Houd vervolgens puntjes 2 en 3 ingedrukt, je voelt een trilling. De configuratie is nu gelukt.
2. **Naar Hable Easy - Verticale Modus.** Om de verticale modus te activeren houd je eerst puntjes 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tegelijk ingedrukt, je voelt nu vier trillingen - hierna kun je de 6 puntjes loslaten. Houd vervolgens puntjes 5 en 6 ingedrukt, je voelt een trilling. De configuratie is nu gelukt.

Horizontale Modus Functies

- Om een **item** te **selecteren** druk op **puntje 1**
- Om de **Google Assistent of Siri** te activeren druk je op **puntje 2**
- Om naar het **thuis scherm** te gaan druk je op **puntje 3**
- Voor **speel/pauze** of de **Magic Tap** druk je op **puntje 4** (Ook telefoon opnemen en ophangen)
- Voor **dicteren** druk je op **puntje 5**
- Om **terug te gaan** druk je op **puntje 6**
- Om een **item vooruit** te gaan druk je op **puntje 7**
- Om naar het **vorige item** te gaan druk je op **puntje 8**.

Verticale Modus Functies (meestal om éénhandig te werken).

- Om een **item** te **selecteren** druk je op **puntje 2**
- Om de **Google Assistent of Siri** te activeren druk je op **puntje 6**
- Om naar het **thuis scherm** te gaan druk je op **puntje 8**
- Voor **speel/pauzes** of de **magic tap** druk je op **puntje 5** (Ook telefoon opnemen en ophangen)
- Voor **dicteren** druk je op **puntje 4**
- Om **terug te gaan** druk je op **puntje 7**
- Om naar het **volgende item** te gaan druk je op **puntje 1**
- Om naar het **vorige item** te gaan druk je op **puntje 3**