



Worldwide Vision
— see things different —

Art. BON00112

MEMORECORDER MILESTONE 112

1. PRODUCT BESCHRIJVING

De memorecorder Milestone 112 is ideaal voor gebruikers die waarde hechten aan simpel- en betrouwbaarheid. Door zijn credit kaart formaat en dikte 14 mm ligt het apparaat goed in de hand.

De belangrijkste punten van de Milestone 112 zijn:

- Beste in zijn soort qua geluid.
- Nieuw ontwikkelde microfoon en opname technologie waardoor je fluisterend en in een drukke zaal een bericht kunt opnemen.
- 25 uur opnamecapaciteit
- Met 1 hand te bedienen
- Grote druktoetsen
- Oplaadbare batterijen, 1 keer opladen per week is voldoende
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Halskoord

2. VISUELE BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

De voorkant:

Houd uw Milestone voor u met de knoppen naar boven. Er zitten vijf knoppen op de voorkant - een grote ronde knop in het midden omringd door vier knoppen die opgesteld zijn in een kruisvorm. De ronde verzonken knop in het midden is de enige met een glad oppervlak zonder voelbare markeringen. Dit is de "Afspelen" knop. Direct onder de "Afspelen" knop vindt u de "Mode" knop. Deze knop is gemarkeerd met een voelbare X. Boven de "Afspelen" knop is de "Opname" knop. Deze knop is gemarkeerd met een voelbare cirkel. Aan de linkerkant van de centrale "Afspelen" knop is de "Linker pijltoets". Deze herkent u door de voelbare pijl naar links. Aan de rechterkant van de "Afspelen" knop

is de "Rechter pijltoets", gemarkeerd met een voelbare pijl naar rechts. Onder deze knoppen kunt u de luidspreker voelen, en in de linkerbovenhoek van het apparaat is er een rood LED lampje.

De bovenkant:

De bovenkant bevat de zesde en laatste drukknop. Het is een kleine ronde knop in de linkerbovenhoek van het apparaat. Dit is de "Keuze" knop. Aan de rechterkant van de "Keuzeknop" is een langwerpige opening - dit is de USB-aansluiting. Naast het overbrengen van gegevens naar een computer, kunt u gebruik maken van de USBaansluiting om de Milestone op te laden. Aan de rechterkant, aan de bovenkant, vindt u de kleine ronde line-in aansluiting.

De onderkant:

Aan de onderkant zit alleen de hoofdtelefoonaansluiting.

GEBRUIKSAANWIJZING:

3. BATTERIJ LADEN

Sluit de meegeleverde lader aan op een stopcontact. Sluit de oplaadkabel aan op de USB aansluiting, in het midden van de bovenzijde. Er klinkt een toon, en het LED-lampje Op het bedieningsoppervlak begint te knipperen (om de drie seconden). Maximale laadtijd bedraagt 3 uur. Houd er rekening mee dat bij een verbinding met een computer via een USB-kabel ook de batterij oplaadt, zolang de computer aan staat. U kunt het batterij niveau controleren via de "Informatie dienst".

4. Hoofdtelefoon

Als u niet wilt luisteren via de externe luidspreker, kunt u een standaard hoofdtelefoon aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting, aan de rechter onderkant van de Milestone. Het geluid zal dan overschakelen van de luidspreker naar de hoofdtelefoon.

5. Via USB aansluiten op de computer, back-up

Sluit Milestone 112 aan op een computer voor een back-up via de USB-kabel. Sluit het kleine uiteinde van de kabel aan op de USB-

aansluiting (midden van de bovenkant). Het grotere uiteinde wordt aangesloten op een standaard USB-poort op uw computer. De verbinding wordt gemeld met het bericht "Verbinding geactiveerd". Op uw computer krijgt u in de verkenner of ander bestandbeheer programma een extra station die M112 heet. U kunt de inhoud van M112 kopiëren naar de computer als back-up. Als u klaar bent met de data overdracht, verwijder de Milestone dan op een veilige manier (hardware veilig verwijderen functie van uw besturingssysteem). Na het losmaken van de USB kabel hoort u "Verbinding niet geactiveerd".

6. Line-in aansluiting voor externe geluidsbron

De line-in ingang aan de rechterkant van de USB-poort kan worden gebruikt om op te nemen van externe geluidsbronnen zoals cd-spelers, radio's et cetera. Sluit daarvoor de line-in ingang aan op de line-out of hoofdtelefoonaansluiting van de externe geluidsbron.

De verbinding moet worden gemaakt met een stereo-audiokabel. Het ene uiteinde van de kabel dient te beschikken over een 3,5 mm stereo connector. Deze is verbonden met Milestone 112. Het andere uiteinde is afhankelijk van de aansluitingmogelijkheid van de externe geluidsbron.

Zie paragraaf voor meer informatie.

7. Aan / Uit (slaapstand)

Milestone 112 heeft geen fysieke aan / uit schakelaar. Druk op "Afspelen" om de Milestone 112 te starten. Na tien minuten geen gebruik, zal het apparaat automatisch in de slaapstand gaan om de batterij te sparen. Het apparaat wordt weer gestart met de "Afspelen" knop. Er zal worden gestart vanaf de laatste positie.
Tip: Als uw Milestone niet start met de "Afspelen" knop, zijn er drie mogelijkheden om na te gaan: Het toetsenbord is vergrendeld, het geluidsvolume staat op het laagste niveau of de batterij leeg is. Zie ook paragraaf 5.4 voor deze punten.

8. Toetsenbordvergrendeling

Wanneer het toetsenbord is vergrendeld, worden alle toetsaanslagen genegeerd, behalve degene waarmee de vergrendeling ongedaan wordt gemaakt. Om het toetsenbord te

vergrendelen, houdt de "Mode" knop ingedrukt en druk kort op de "Opname" knop en laat de "Mode" knop los. U hoort "Toetsenblokkering". Om de vergrendeling op te heffen voert u dezelfde handeling uit. U hoort nu "Toetsen actief".

9. Volumeregeling

Er zijn 16 volumeniveaus. Om het volume te verhogen met één niveau, houdt u de "Mode" knop ingedrukt en drukt u op de "Rechter pijltoets". U hoort "volume hoger". Met de combinatie "Mode" knop ingedrukt en de "Linker pijltoets" gaat het volume omlaag en hoort u "Volume lager".

Tijdens het afspelen hoor je het volume wijzigen, zonder een melding. Als het volume wordt gewijzigd in de Pauze stand, dan krijgt u wel de meldingen te horen. Het maximale en minimale geluidsniveau wordt aangegeven door een pieptoon.

10. Informatie dienst

Houd de "Mode"-knop ten minste 1,5 seconden ingedrukt om de Informatie Service te starten.

U ontvangt de volgende informatie:

- Nummer van de huidige spraakopname. Als de extra mappen zijn geactiveerd, de map waarin de opname is opgeslagen
- Geheugenstatus
- Batterijstatus
- 6-cijferig serienummer
- Softwareversie

Stop het voorlezen van bovenstaande informatie door op de "Keuze" knop te drukken.

Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 013 52 85 666
E info@worldwidevision

