



Worldwide Vision
— see things different —

Art: COB20000
SENSA VLOEISTOFNIVEAU-INDICATOR

Handleiding

De Sensa vloeistof indicator is een klein hulpmiddel waarmee u middels een pieptoon kunt horen hoe ver uw kopje of glas al is volgeschonken. U kunt het gebruiken om schone handen te houden bij het inschenken en het voorkomt aangebrande vingertoppen bij hete dranken. Deze uitvoering is met name bedoeld voor mensen met een visuele beperking, die regelmatig zelf mixdranken maken zoals bijvoorbeeld Bacardi-cola of gin-tonic. Er is namelijk signaal bij het onderste laagje vloeistof en er klinkt ook een signaal als het glas vol is.

De Sensa vloeistof indicator is overwegend van kunststof en bestaat uit een platte pen die u in uw glas hangt, en een dikker gedeelte waarin zich de batterij en de elektronica bevindt. Aan het uiteinde van de pen zit een sensor, die u waarschuwt als er een kleine laag vloeistof in uw glas is, bijvoorbeeld de gin of de Bacardi rum. Hogerop aan de pen vindt u de tweede sensor, die waarschuwt als het glas vol is.

Hoe werkt het?

Als u geen mixdrank maakt maar u wilt alleen een glas of kopje vullen, dan zal de Sensa ook eventjes piepen als er ongeveer een centimeter vloeistof in het glas is, maar dit kunt u dan gewoon negeren. Stop met schenken als de tweede, ononderbroken pieptoon klinkt. Hang de Sensa op de rand van het lege glas. De platte pen moet naar omlaag in het glas wijzen. Het dikkere gedeelte op de rand van het glas mag echter in geen geval in aanraking komen met de vloeistof. Het einde van de platte pen moet de bodem van het glas raken.

Als het glas echter hoog is, bijvoorbeeld als u een longdrink glas aan het vol schenken bent waardoor de punt van de pen de bodem niet raakt, druk de Sensa dan voorzichtig verder omlaag tot dat wel het geval is. Als het glas hoger is dan gemiddeld en u drukt door, dan komt er een klein vierkant vlakje uit de bovenkant van de Sensa. Dit is normaal, want dit zorgt dat de pen verlengd wordt. Na de meting drukt u dit vlakje weer gewoon terug op de Sensa.

De 'SENSA' heeft een hersteltijd van ongeveer 30 seconden nodig, alvorens hij weer gebruikt kan worden. Wacht u geen 30 seconden, dan zal het eerste geluidssignaal korter hoorbaar zijn. De batterij bevindt zich in het rechthoekige onderste gedeelte van de voorkant achter het vierkant dekseltje. Verwissel de batterij niet zelf omdat hij bevestigd is met een veermechanisme, maar laat dit door een deskundige doen. De levensduur van de batterij is een tot twee jaar. Het batterij type is 2 GP-392 knoopcel.

Dompel de Sensa nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl