



Worldwide Vision
— see things different —

Art: IL421093

Engelssprekende timer / stopwatch met klok

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUDSOPGAVE

1. Mogelijkheden
2. Beschrijving van de timer
3. Stroomverzorging
4. Gebruik
 - 4.1 Klok: tijd uitspreken
 - 4.2 Klok: instellen
 - 4.3 Kookwekker: countdown timer gebruiken
 - 4.4 Stopwatch: count-up timer gebruiken
 - 4.5 Spraak aan/uit
 - 4.6 Geheugen

1. Mogelijkheden

Deze Engelssprekende timer heeft een digitale klok. Daarnaast beschikt het zowel over een count-up- als ook over een countdown timer.

Een countdown timer werkt hetzelfde als een kookwekker waarbij u een begintijd instelt die afloopt tot 0, waarna u een alarmsignaal hoort. Een count-up timer werkt hetzelfde als een stopwatch, waarbij de tijd op 0 begint en optelt, zodat u kunt meten hoe lang een bepaalde gebeurtenis duurt.

2. Beschrijving van de timer

De behuizing is gemaakt van lichtgewicht kunststof en meet ongeveer 8 bij 6.5 bij 2 centimeter. Op de voorkant is het verzonken display met 2 rijtjes van elk 3 knoppen. Op de achterzijde is een

riemclip waarvan de achterkant magnetisch is, zodat u de timer gemakkelijk op een verticale metalen oppervlak zoals een koelkast kunt hangen. Ook kunt u het met deze clip rechtop zetten. Het klepje waarachter de batterij is, zit achter de clip. Het onderste deel van de voorkant van de timer, onder de toetsen is een schuifbaar klepje waaronder zich nog een schuifje en twee extra knoppen bevinden. Als u de voorkant met het display en de knoppen naar u toe houdt, moet het display boven en de knoppen onder zijn.

Het bovenste rijtje knoppen bevat van links naar rechts achtereenvolgens uren, minuten, seconden. De toetsen op het onderste rijtje zijn van links naar rechts clear, memory en start/stop. Als u het klepje aan de voorkant omlaag schuift vindt u links een horizontaal schuifje en rechts twee naast elkaar liggende toetsen. Het schuifje links is repeat on/off. De linker drukknop is voice on/off en de rechter knop is sound. Aan de rechter zijkant van de timer is een verticale schuif met vier posities. Van boven naar beneden zijn dit stopwatch, timer, klok en instellen klok. Onder deze schuif is een klein geribbeld vlakje. Precies op dezelfde hoogte aan de linker zijkant is er nog 1. Zet uw vingers op beide vlakjes en beweeg de schuifklep omlaag als u deze aan de voorkant wilt openen.

3. Stroomverzorging

Dit apparaat werkt op twee knoopcel batterijen type L1154. Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de timer, achter de clip. Houd de clip aan de bovenkant ingedrukt zoals je de timer normaal zou neerzetten op een tafel en schuif het geribbelde dekseltje naar beneden. U kunt nu de batterijen vervangen. Gooi de oude batterijen niet weg, maar bied ze aan als klein chemisch afval.

4. Gebruik

4.1 Klok: tijd uitspreken

Zet de schuif op de rechter kant van de timer in de tweede positie van onderen. Dit is de normaalstand van het schuifje. De tijd wordt uitgesproken als u op 1 van de 6 toetsen aan de voorkant drukt.

4.2 Klok: instellen

Zet het schuifje op de rechter kant van de timer in de onderste positie. De drie knoppen in het bovenste rijtje zijn bedoeld om de tijd in te stellen. Druk herhaaldelijk op elke toets tot de tijd juist is ingesteld. Gebruik de linker toets voor uren, de middelste voor minuten en de rechtse voor seconden. Als de tijd is ingesteld kunt u de schuif aan de rechter kant weer in de tweede positie van onder zetten. Dat is de normaalstand, waarbij de huidige tijd wordt uitgesproken door 1 van de 6 toetsen op de voorkant in te drukken.

4.3 Kookwekker: countdown timer gebruiken

De countdown timer is bedoeld om gewaarschuwd te worden nadat een door u ingestelde tijd verstreken is, zoals een kookwekker dat doet. Natuurlijk kunt u deze aftelfunctie voor elk gewenst doel gebruiken. Bij het bereiken van de eindtijd hoort u een signaal. Behalve deze basale functie beschikt de timer echter ook nog over een aantal extra mogelijkheden binnen deze functie.

Zet de schuif op de rechter kant van de timer in de tweede positie van boven om de aftelfunctie te kunnen instellen. Gebruik vervolgens de drie toetsen in het bovenste rijtje voor het instellen van uren, minuten en/of seconden, op dezelfde manier waarop u de tijd van de klok hebt ingesteld, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4.2. Na het instellen van een tijd drukt u op start/stop, de rechtse toets in het onderste rijtje. Het aftellen begint.

Tijdens het aftellen hoort u regelmatig de stand van de timer. De resterende tijd zal als volgt aangegeven worden. Als u met uren werkt, hoort u elk uur de resterende tijd. Tijdens het laatste uur hoort u dit elke tien minuten. Tijdens de laatste tien minuten elke minuut, de laatste minuut elke tien seconden, de laatste tien seconden iedere seconde.

Als de door u ingestelde tijd voorbij is hoort u een alarmsignaal. Als u dan niets doet klinkt dit gedurende 1 minuut en dan loopt de timer verder, waarbij u periodiek gewaarschuwd wordt zodat u weet hoe lang de ingestelde tijd al verstreken is. De timer zegt bijvoorbeeld:

"two minutes over". Dat betekent dat het nu twee minuten geleden is dat het alarm begon te klinken.

Om de timer weer uit te zetten drukt u op start/stop. De verstreken tijd sinds het alarm staat nu in het display, maar deze wordt niet uitgesproken. Om de timer op 0 te zetten drukt u op clear, de linkse toets in het onderste rijtje. Daarna kunt u de schuif aan de rechterkant van de timer weer in de tweede stand van onder zetten, zodat een toetsdruk weer de tijd van de gewone klok uitspreekt.

Een bijzondere functie van deze timer is de herhaalfunctie. Als u namelijk om de paar minuten, om de paar uur etc. gewaarschuwd wilt worden, dan hoeft u bij deze timer niet telkens opnieuw de starttijd voor het aftellen in te stellen nadat het alarm is gegaan. Onder het klepje aan de voorkant van de timer, zit links een horizontaal schuifje. Als u dit naar rechts schuift, dan werkt de timer zoals hierboven beschreven. Schuift u het echter naar links, dan begint de timer na het geven van het alarmsignaal weer uit zichzelf opnieuw met aftellen. Hoe lang u een alarmsignaal hoort telkens wanneer de eindtijd wordt bereikt, is afhankelijk van de afteltijd die u instelt, als volgt.

Is de ingestelde tijd meer dan twee minuten, dan zal er gedurende 1 minuut een alarmtoon te horen zijn, telkens wanneer de eindtijd bereikt wordt. Welk signaal dit is kunt u zelf instellen, zoals hieronder beschreven. Is de ingestelde tijd tussen de tien seconden en twee minuten, dan zullen er twee pieptonen te horen zijn. Is de ingestelde tijd minder dan tien seconden, dan zal er 1 pieptoon te horen zijn als de spraak uit staat, en er zal zelfs helemaal geen alarm klinken als de spraak aan staat. Wel hoort u de timer dan aftellen tijdens de laatste tien seconden, dus u weet altijd wanneer het aftellen opnieuw gaat beginnen.

Om de timer te onderbreken, drukt u op start/stop. Om de tijd weer verder te laten lopen, drukt u nogmaals op start/stop, waarna de tijd weer verder loopt. Om het alarmsignaal te kiezen dat u gedurende 1 minuut hoort, gebruikt u een knop onder het klepje aan de voorkant. Schuif het klepje omlaag en druk herhaaldelijk op de

rechtse toets. Bij elke toetsdruk hoort u een ander signaal. Als u ze allemaal doorlopen hebt hoort u weer het eerste signaal uit het rijtje.

4.4 Stopwatch: count-up timer gebruiken

Zet de schuif op de rechter kant van de timer in de bovenste positie voor de stopwatch. De stopwatch biedt geen spraakondersteuning. Zie echter de tips hieronder voor een alternatieve stopwatch methode.

Druk op start/stop om de stopwatch te starten. Om de stopwatch stil te zetten drukt u opnieuw op start/stop. De verstreken tijd staat dan op het display, maar u kunt deze niet via de spraak laten weergeven. Na 23 uur, 59 minuten en 59 seconden zal de stopwatch opnieuw beginnen op nul seconden.

Tips:

1. Om te checken of de stopwatch momenteel aan het lopen is of niet, kunt u op de clear toets drukken, links in het onderste rijtje.

Hoort u niets, dan is de stopwatch nu aan het tellen en dan heeft clear geen effect. Hoort u echter een piep als u op clear drukt, dan was de stopwatch in ruststand, waarbij de clear toets de stopwatch weer op nul heeft gezet.

2. Ondanks dat de stopwatch geen spraakondersteuning biedt, is er wel een manier om te meten hoe lang een bepaalde gebeurtenis duurt. Dit is een iets minder nauwkeurige methode. U kunt namelijk in plaats van de stopwatch ook gebruik maken van het feit dat de aftelfunctie, na het overschrijden van de eindtijd, telkens meldt hoe lang de eindtijd al verstreken is. Die indicaties kunt u gebruiken als stopwatch, met een nauwkeurigheid van 1 minuut. Zet daartoe het schuifje aan de rechter kant van de timer in de tweede stand van boven en stel een afteltijd in van 1 seconde. Als u nu het aftellen start, dan is na 1 seconde de eindtijd al bereikt, waarna de timer verder telt en u periodiek meldt hoe lang de eindtijd al overschreden is.

4.5 Spraak aan/uit

Op de voorkant van de timer is een klepje waarachter zich links een schuifje en rechts twee naast elkaar gelegen toetsen bevinden. De linkse van deze twee toetsen schakelt de spraak aan en uit. Hoort u bij het indrukken 1 piepje dan is de spraak nu uit. Hoort u 2 piepjes, dan is de spraak aan.

4.6 Geheugen

Er kan 1 tijd opgenomen worden in het geheugen van de timer. Daartoe moet u de gewenste tijd instellen, waarna u op memory drukt. Dit is de middelste knop in de onderste rij. Als u deze ingestelde tijd in de toekomst wilt gebruiken, hoeft u alleen maar op memory te drukken en daarna op start/stop. Om het geheugen te wissen drukt u eerst op stop om de timer te stoppen, daarna op memory en dan op clear.

WORLDWIDE VISION

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 52 85 666

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl