



Handleiding MiniVision 2+

Artikelnummer: KAP20000

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Wat zit er in de doos:	3
Productbeschrijving:	3
Activeren:	6
Aan de slag:	7
Startscherm en Lijst met toepassingen	9
Telefoon	10
Contacten	14
Berichten	17
Berichten beheren in Gespreksmodus	18
Alarm	25
Kalender	27
Camera	29
Galerij	29
FM Radio	31
Lichtsensoren	31
Kleurdetectie	32
Bankbiljetherkenner	33
Rekenmachine	33
Stemrecorder	33
Zaklamp	35
Weer	35
Noodfunctie	35
Waar ben ik?	36
Handleiding	37
Instellingen	37
Technische specificaties	40
Bij problemen	40
Over dit document	42
Juridische kennisgeving en garantie	43
Index – Navigatiepaneeltoetsen	44



Worldwide Vision

— see things different —

Index – Alfabetische toetsen	45
Index – Toegankelijkheidssneltoetsen	45
Index – Sneltoetsen in bewerkvelden	46



Artikel 1: Inleiding

De **MiniVision2+** is een mobiele telefoon die speciaal is ontworpen voor mensen met een visuele beperking, slechthoortendheid of blindheid.

Dankzij het echte, grote en tastbare fysieke toetsenbord, de volledig uitgesproken interface en de spraakcommando's is de MiniVision2+ voor 100% toegankelijk en eenvoudig te gebruiken.

De gebruikersinterface en functies van deze telefoon zijn volledig aangepast om eenvoudig te leren en bruikbaar te zijn in het dagelijks leven.

Deze handleiding is bedoeld om je stap voor stap te begeleiden bij het gebruik van de verschillende functies.

Hij is een aanvulling op de **Snelstartgids** en helpt je om het maximale uit je MiniVision2+ te halen.

Artikel 2: Wat zit er in de doos:

De MiniVision2+ wordt geleverd met:

- Batterij
- USB-oplaadkabel
- Stereo-oordopjes met microfoon
- Oplaadstation (dock)
- Beschermhoes
- Snelstartgids

De lijst met accessoires, configuratie of productversies kan per land verschillen.

Het uiterlijk en de kenmerken van het product en de accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij raden aan uitsluitend door **KAPSYS** goedgekeurde accessoires te gebruiken.

Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan leiden tot prestatieproblemen of storingen die niet onder de garantie vallen.

Artikel 3: Productbeschrijving: Voorkant

De voorkant van de MiniVision2+ bestaat uit twee afzonderlijke delen:

- **Bovenkant:** een 2,3-inch scherm waarmee je de inhoud van de telefoon kunt bekijken. De helderheid, tekstgrootte en het contrast van het scherm kun je aanpassen in het gedeelte **Beeldscherm** van de instellingen. Boven het scherm zit een luidspreker die wordt gebruikt tijdens telefoongesprekken.
- **Onderkant:** hieronder bevindt zich het fysieke toetsenbord, verdeeld in twee delen:
 1. Het **navigatie- en bedieningspaneel** waarmee je door het menusysteem navigeert, het volume beheert en bepaalde acties uitvoert. Dit paneel bestaat uit:
 - Een rechthoekige **OK-knop** met voelbare textuur in het midden.
 - Vier **navigatieknoppen** (boven, onder, links, rechts) rondom de OK-knop.



- Functies van de navigatieknoppen:
 - **Omhoog**: vorig item selecteren
 - **Omlaag**: volgend item selecteren
 - **Links**: volume verlagen
 - **Rechts**: volume verhogen
 - **OK**: geselecteerd item bevestigen

Tip: Houd de OK-knop ingedrukt om spraakherkenning te activeren. Hiermee kun je acties starten of tekst dicteren (internetverbinding vereist).

2. Aan de linkerzijde bevinden zich de **Menu-knop** (rechthoekig, symbool: vierkant) en de **Oproepknop** (drie voelbare groene stippen).
 - Menu opent extra opties (instellingen, verzenden, annuleren, verwijderen, bewerken enz.).
 - Oproepknop beantwoordt inkomende oproepen of opent de belgeschiedenis (lange druk).
3. Aan de rechterzijde bevinden zich de **Terug-knop** (rechthoekig, symbool: driehoek) en de **Gesprek beëindigen-knop** (drie voelbare rode stippen).
 - Terug: vorige scherm of teken wissen.
 - Gesprek beëindigen: ophangen, oproep weigeren, terug naar startscherm of telefoon aan/uitzetten (lange druk).
4. Het **alfanumerieke toetsenbord** bestaat uit 12 toetsen (4 rijen van 3):
 - Rij 1: 1 – 2 – 3
 - Rij 2: 4 – 5 – 6
 - Rij 3: 7 – 8 – 9
 - Rij 4: * – 0 – #Toets 5 heeft een voelbare markering.

Bovenkant

Aan de bovenkant zit een LED voor de zaklampfunctie.

Onderkant

Van links naar rechts:

- 3,5 mm audio-aansluiting (koptelefoon),
- USB-aansluiting (opladen),
- Contactpunten voor het oplaadstation.

Achterkant

Van links naar rechts:

- Camera (voor Camera, Kleurendetector, Bankbiljetdetector, Lichtdetector),
- Noodknop (SOS-functie),
- Luidspreker.

De achterklep is volledig afneembaar en biedt toegang tot batterij, SIM-kaartslot en microSD-kaartslot.



Worldwide Vision

— see things different —



Artikel 4: Activeren: SIM-kaart plaatsen

- Alleen compatibel met **Nano-SIM (4FF-formaat)**.
- Verwijder de achterklep via de inkeping links onderaan.
- Plaats de SIM onder de batterij (linksboven), chip naar beneden, schuine hoek linksonder.
- Schuif voorzichtig helemaal naar links.

Tip: Je kunt een geheugenkaart plaatsen in het SD-slot (rechtsonder, onder de batterij) om het geheugen uit te breiden.

Batterij plaatsen

- Plaats eerst de onderkant van de batterij in de gleuf (herkenbaar aan de laadcontacten).
- Klik daarna de bovenkant vast.
- Sluit de achterklep.

Batterij opladen

- Eerste keer: minstens **4 uur opladen**.
- Gebruik afhankelijk van je verbruik.
- Batterijduur kan worden verbeterd door helderheid te verlagen, slaapstand sneller te activeren of Bluetooth/Wi-Fi uit te zetten.

Opladen kan:

- Met USB-kabel en adapter aan een stopcontact,
- Met het oplaadstation (telefoon rechtop in de dock plaatsen, zonder hoesje).

Aan- en uitzetten

- **Aanzetten:** Houd de rode **Gesprek beëindigen-knop** (rechtsonder) ingedrukt tot de telefoon trilt.
- **Uitzetten:** Houd dezelfde knop ingedrukt, bevestig met **OK**.

Slaapstand

- Korte druk op rode knop → slaapstand (scherm en toetsen uit, oproepen/sms blijven actief).
- Nogmaals drukken → terug naar **Startscherm**.
- Optie *Wake-up Speech*: laat datum, batterij, gemiste oproepen en berichten aankondigen.
- Standaard: automatisch in slaapstand na 1 minuut inactiviteit (instelbaar bij **Beeldscherm**).

SIM ontgrendelen met PIN

- Bij het aanzetten kan een **PIN-code (4 cijfers)** worden gevraagd.
- Toets de code in en bevestig met **OK**.



- Na 3 verkeerde pogingen wordt de SIM geblokkeerd en is de **PUK-code (8 cijfers)** nodig van je provider.
- Je kunt altijd het **noodnummer** bellen vanuit het PIN-scherf (afhankelijk van provider).

Artikel 5: Aan de slag: Basisprincipes gebruikersinterface

De interface van de MiniVision2+ is ontworpen voor eenvoudige bediening:

- Alle items op het scherm staan in een lijst.
- Elke regel bevat één item.
- Lange teksten scrollen automatisch horizontaal.
- Standaard: witte tekst op zwarte achtergrond.
- Navigeren met Omhoog/Omlaag: geselecteerd item wordt omgekeerd weergegeven (zwart op wit).
- Elk item wordt uitgesproken.
- Bij een nieuw scherm wordt altijd het **eerste item** geselecteerd.
- Bij terugkeren naar een vorig scherm staat de selectie op het laatst gebruikte item.

Navigeren door het menusysteem van de MiniVision2+

Het menusysteem van de MiniVision2+ is eenvoudig en lineair opgebouwd.
Je kunt het als volgt bedienen:

- Gebruik de **Omhoog-** en **Omlaag-**toetsen om door de lijst met menu-items te bladeren.
- Druk op **OK** om het geselecteerde item te openen of te bevestigen.
- Druk op de **Terug-knop** om terug te keren naar het vorige scherm.

Het geluidsvolume wijzigen van de MiniVision2+

- Druk op de **Linker navigatietoets** om het volume te verlagen.
- Druk op de **Rechter navigatietoets** om het volume te verhogen.

Het volume kan worden aangepast tijdens gesprekken, het luisteren naar multimedia, of in het algemeen gebruik van de telefoon.

Spraakcommando's gebruiken

De MiniVision2+ beschikt over ingebouwde spraakherkenning. Hiermee kun je functies starten of tekst invoeren zonder het toetsenbord te gebruiken.

- **Activeren:** Houd de **OK-knop** ingedrukt.
- Vereist: een actieve internetverbinding (via Wi-Fi of mobiel netwerk met data-abonnement).

Met spraakcommando's kun je:



- Een toepassing openen of een actie starten (bijvoorbeeld: “Berichten openen”, “Contacten zoeken”).
- Tekst dicteren in een invoerveld (bijvoorbeeld een bericht of notitie inspreken).

Tip: Spreek duidelijk en in een stille omgeving voor de beste resultaten.

Schrijven met het fysieke toetsenbord

De MiniVision2+ gebruikt een traditioneel alfanumeriek toetsenbord (12 toetsen).

De invoer werkt volgens het principe van **meervoudige toetsaanslagen**:

- Elke toets vertegenwoordigt meerdere letters of tekens.
- Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om door de bijbehorende letters te bladeren.
- Bijvoorbeeld: toets **2** geeft achtereenvolgens de letters **A, B, C**.
- Pauzeer kort of druk op een andere toets om het gekozen teken te bevestigen.

Er is een voelbare markering op toets **5**, zodat je eenvoudig je positie kunt vinden.

Schrijven met spraakherkenning

Naast het fysieke toetsenbord kun je ook tekst dicteren.

- Open een invoerveld (bijvoorbeeld bij berichten).
- Houd de **OK-knop** ingedrukt om spraakherkenning te activeren.
- Spreek de gewenste tekst duidelijk uit.
- De tekst wordt automatisch omgezet en ingevoerd in het tekstvak.

Een tekst verwijderen

Tijdens het schrijven of bewerken kun je tekens of hele teksten wissen:

- **Een enkel teken verwijderen:** druk kort op de **Terug-knop**.
- **De hele tekst wissen:** houd de **Terug-knop** ingedrukt.

Een tekst aanpassen

Als je tekst wilt wijzigen nadat deze is ingevoerd:

- Gebruik de **Omhoog-** en **Omlaag-toetsen** om de cursor in het invoerveld te verplaatsen.
- Wis of voeg tekens toe zoals gewenst.

Bewerkingsmenu

Tijdens het invoeren van tekst kun je extra functies oproepen via de **Menu-knop**.

Voorbeelden:

- Valideren (bevestigen)



- Verzenden
- Annuleren
- Tekst verwijderen
- Tekst bewerken

Sneltoetsen voor bewerken

Er bestaan sneltoetscombinaties om sneller te werken in tekstvelden:

- **Ster-toets + 1:** Hele tekst selecteren
- **Ster-toets + 2:** Tekst kopiëren
- **Ster-toets + 3:** Tekst knippen
- **Ster-toets + 4:** Tekst plakken

Toegankelijkheidssneltoetsen

De MiniVision2+ bevat verschillende sneltoetsen speciaal voor toegankelijkheid, zoals:

- **Lang indrukken van OK:** Spraakherkenning starten
- **Lang indrukken van Oproepknop:** Belgeschiedenis openen
- **Kort indrukken rode knop:** Slaapstand
- **Lang indrukken rode knop:** Aan/uitzetten

Artikel 6: Startscherm en Lijst met toepassingen

Startscherm

Het startscherm is het hoofdscherm van de MiniVision2+. Dit scherm laat je snel de tijd, het aantal ongelezen berichten en het aantal gemiste oproepen op je telefoon zien.

Door de **Oproep beëindigen**-toets in te drukken, ga je terug naar het startscherm zolang de telefoon aanstaat. Je kunt op elk moment en vanaf elke locatie terugkeren naar het startscherm. Dit is vooral handig als je verdwaald bent in de telefoonmenu's.

Goed om te weten: Wanneer het startscherm wordt weergegeven, kun je direct een telefoonnummer kiezen of de functie “Sneltoetsen” gebruiken. Deze functie, beschreven in de sectie « Toetsenbord » van de MiniVision2+-instellingen, stelt je in staat om snel een toepassing te starten of een contact te bellen door een van de toetsen op het toetsenbord ingedrukt te houden.

Om de lijst met toepassingen te openen, druk je op een van de volgende drie knoppen: **Omhoog**, **Omlaag** of **OK**.

Lijst met toepassingen

Wanneer je het startscherm verlaat zoals eerder beschreven, zie je de lijst met toepassingen, oftewel de lijst met telefoonfuncties. De MiniVision2+ heeft 20 toepassingen:

- Telefoon
- Contacten



- Berichten
- Alarm
- Agenda
- Camera
- Galerij
- FM-radio
- Lichtdetector
- Kleurenherkenner
- Bankbiljettenherkenner
- Rekenmachine
- Spraakrecorder
- Notities
- Zaklamp
- Weer
- Noodgeval
- Waar ben ik?
- Gebruikershandleiding
- Instellingen

Elke toepassing wordt in detail uitgelegd in de volgende secties.

Om een toepassing te openen, gebruik je de **Omhoog-** of **Omlaag-**toets om de toepassing te selecteren en druk je op de **OK-**toets om te bevestigen.

Om een toepassing te verlaten, druk je op de **Terug-**toets. Het kan zijn dat je de Terug-toets meerdere keren moet gebruiken als je meerdere schermen van dezelfde toepassing hebt geopend. Je kunt ook een toepassing afsluiten zonder de huidige wijzigingen op te slaan door terug te keren naar het startscherm via de **Oproep beëindigen-**toets.

Goed om te weten: De lijst met standaard geïnstalleerde toepassingen in de MiniVision2+ kan verschillen per land, provider en productconfiguratie.

Artikel 7: Telefoon

Inleiding

De toepassing **Telefoon** stelt je in staat om te bellen, je voicemail en je oproepgeschiedenis te bekijken. Je kunt de Telefoon-toepassing op elk moment openen door de **Oproep-**toets in te drukken.

Een inkomende oproep beantwoorden

Wanneer de telefoon overgaat, druk je op de **Oproep-**toets om de oproep te beantwoorden. De Oproep-toets bevindt zich aan de linkerzijde van het navigatiepaneel, onder de Menu-toets. Deze wordt gesymboliseerd door drie verticale, groene, voelbare puntjes.

Standaard is de instelling “*Oproep aannemen met toetsen 0-9*” ingeschakeld, waarmee je een inkomende oproep kunt accepteren door een willekeurige alfanumerieke toets op het fysieke toetsenbord in te drukken. Voor meer informatie, raadpleeg de sectie « Toetsenbord » van de MiniVision2+-instellingen.



Goed om te weten: Wanneer de telefoon overgaat, kun je de telefoon dempen en de nummerherkenning horen door de **Links-** of **Rechts-**toets in te drukken. Om de nummerherkenning te herhalen, druk je op de **Omhoog-** of **Omlaag-**toets.

Een gesprek beëindigen

Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de knop Gesprek beëindigen aan de rechterkant van het navigatiepaneel, onder de knop Terug. Deze knop wordt weergegeven door drie horizontale rode stippen.

Een inkomende oproep weigeren

Om een inkomende oproep te weigeren, druk je op de **Oproep beëindigen**-toets.

Een telefoongesprek voeren

Vanaf het **Startscherm** gebruik je de **Omhoog-** of **Omlaag-**toetsen om een van de volgende vier opties te selecteren:

- **Contact bellen:** hiermee kun je een contact selecteren uit je telefoonboek. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om een contact uit de lijst te selecteren en start het gesprek door op de **OK**-toets te drukken.
Goed om te weten: net zoals in de toepassingen Contacten en Berichten, kun je het alfanumerieke toetsenbord gebruiken om je contact te vinden. De lijst met namen wordt tijdens het typen gefilterd. Het filter wordt toegepast op het begin van de Voor- en Achternaam. Je kunt altijd door de gefilterde lijst bladeren met de Omhoog- of Omlaag-toets. Om een teken uit het filter te wissen, druk je op de **Terug**-toets. Wanneer het contact is gevonden, druk je op de **OK**-toets om het gesprek te starten.
- **Nummer kiezen:** hiermee kun je een telefoonnummer cijfer voor cijfer invoeren. Wanneer een invoerveld verschijnt, typ je je nummer met het numerieke toetsenbord en bevestig je de invoer en start je het gesprek door op de **OK-** of **Oproep**-toets te drukken.
Goed om te weten: je kunt ook rechtstreeks vanaf het startscherm of de hoofdpagina van de Telefoon-toepassing een nummer intoetsen. Hiervoor gebruik je het numerieke toetsenbord om het nummer cijfer voor cijfer in te voeren en bevestig je met de **OK-** of **Oproep**-toets.
- **Oproepgeschiedenis:** hiermee kun je een contact of telefoonnummer terugbellen vanuit de lijst met eerdere oproepen. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om het gewenste nummer te selecteren en druk op de **OK**-toets om het optiemenu te openen. Gebruik opnieuw de Omhoog- of Omlaag-toets om “Bellen” te selecteren en bevestig met de **OK**-toets.
- **Voicemail:** hiermee bel je je voicemail om je berichten te beluisteren.

Opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kun je op de **Menu**-toets drukken om de volgende opties te openen:

- **Luidspreker inschakelen:** schakelt het geluid van het gesprek naar de luidspreker van de MiniVision2+ (handsfree-modus). Om de handsfree-modus uit te schakelen, druk je opnieuw op **Menu**, selecteer je “Luidspreker uitschakelen” en bevestig je met de **OK**-toets.



Goed om te weten: een korte druk op de **Oproep**-toets schakelt de luidspreker ook aan of uit.

- **Dempen:** schakelt de microfoon van de MiniVision2+ uit, zodat de andere persoon je niet kan horen.
- **Oproep toevoegen:** pauzeert het huidige gesprek en belt een tweede contact. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om het tweede contact in de lijst te selecteren en druk op de **OK**-toets om het nieuwe gesprek te starten.

Om te wisselen tussen de twee gesprekken, druk je op **Menu**, selecteer je “Gesprekken wisselen” met de Omhoog- of Omlaag-toets en bevestig je met de **OK**-toets.

Om gesprekken in conferentiemodus te zetten, druk je op **Menu**, selecteer je “Conferentie” met de Omhoog- of Omlaag-toets en bevestig je met de **OK**-toets.

Goed om te weten: tijdens een conference call beëindigt de **Oproep beëindigen**-toets beide gesprekken.

Wanneer je al in gesprek bent en er komt een tweede oproep binnen, ontvang je hiervan een melding. Druk op de **Oproep**-toets om de tweede oproep te accepteren en de eerste in de wacht te zetten. Zodra de tweede oproep is verbonden, beëindigt de **Oproep beëindigen**-toets de huidige oproep en schakelt terug naar het gesprek in de wacht.

Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis laat je alle oproepen zien die zijn gepleegd, ontvangen of gemist met de MiniVision2+. Het aantal gemiste oproepen wordt weergegeven op het startscherm en ook in de lijst met toepassingen wanneer je “Telefoon” selecteert. De optie “*Spraakactivering bij ontwaken*” kondigt ook het aantal gemiste oproepen aan wanneer je de slaapstand verlaat. Raadpleeg voor meer informatie de sectie « Vocalisatie » van de MiniVision2+-instellingen.

Goed om te weten: Meldingen van gemiste oproepen verdwijnen zodra je de oproepgeschiedenis hebt bekeken.

Vanaf het hoofdscherm van de Telefoon-toepassing gebruik je de Omhoog- of Omlaag-toets om “Oproepgeschiedenis” te selecteren en bevestig je met de **OK**-toets.

Je kunt ook rechtstreeks vanaf het startscherm toegang krijgen tot de oproepgeschiedenis door de **Oproep**-toets lang ingedrukt te houden.

De lijst met gemaakte, ontvangen en gemiste oproepen wordt weergegeven van meest recent naar oudste. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om een contact of nummer te selecteren en druk op de **OK**-toets om de volgende opties te openen:

- **Bellen:** om het geselecteerde contact of nummer terug te bellen.
- **Tekstbericht verzenden:** om een sms te sturen naar het geselecteerde contact of nummer.
- **Details:** bekijk de details van een oproep. De volgende informatie is beschikbaar:



- **Naam:** toont de naam van het contact dat jou belde of dat jij belde (alleen zichtbaar als het nummer in je contacten staat).
- **Datum:** toont de datum van de oproep.
- **Duur:** toont de duur van de oproep.
- **Status:** toont het type oproep (uitgaand, inkomend, gemist).
- **Telefoonnummer:** toont het telefoonnummer van het contact.
- **Verwijderen:** verwijdert de oproep uit de geschiedenis.
- **Contact aanmaken:** hiermee maak je een contact aan van een onbekend nummer in de geschiedenis. Er verschijnt een nieuw scherm voor het aanmaken van een contact met het veld “Telefoonnummer” al ingevuld. Volg de procedure « Contact aanmaken » om de aanmaak af te ronden.

Goed om te weten: Om alle nummers uit de oproepgeschiedenis te verwijderen, druk je op **Menu** vanuit “Oproepgeschiedenis”, selecteer je “Alles verwijderen” met de Omhoog- of Omlaag-toets en bevestig je met de **OK**-toets. Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer “Ja” met de Omhoog- of Omlaag-toets en druk op de **OK**-toets om alles te wissen.

Goed om te weten: Als je alleen de gemiste oproepen wilt weergeven, druk je op **Menu** en vink je de optie “Alleen gemiste oproepen weergeven” aan.

Instellingen (Telefoon)

Vanaf het hoofdscherm van de Telefoon-toepassing druk je op **Menu** om de opties van de Telefoon-toepassing te openen. Gebruik daarna de Omhoog- of Omlaag-toets om “Instellingen” te selecteren en bevestig met de **OK**-toets. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- **Trillen:** laat de telefoon trillen bij een inkomende oproep. Standaard is deze optie uitgeschakeld. Druk op de **OK**-toets om te activeren.
- **Nummerherkenning verbergen:** verbergt en vocaliseert de naam of het nummer van de beller niet bij een inkomende oproep. Standaard is dit uitgeschakeld. Druk op de **OK**-toets om te activeren.
- **Oproepen van onbekenden blokkeren:** filtert oproepen van nummers die niet in je contactenlijst staan. Deze oproepen worden automatisch doorgestuurd naar je voicemail en de telefoon gaat niet over. Standaard is dit uitgeschakeld. Druk op de **OK**-toets om te activeren.
- **Automatische handsfree-modus:** schakelt automatisch over naar handsfree zodra een oproep wordt aangenomen. Standaard is dit uitgeschakeld. Druk op de **OK**-toets om te activeren.
- **Telefoonbeltoon:** stel de algemene beltoon van de telefoon in. Druk op **OK** om te wijzigen. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toetsen om een beltoon te selecteren. Deze wordt enkele seconden afgespeeld. Druk op **OK** om je keuze te bevestigen.
- **Voicemailnummer:** stel het telefoonnummer van je voicemail in. Druk op **OK** om een invoerveld te openen en voer het nummer in. Druk opnieuw op **OK** om op te slaan. Daarna kun je je voicemail bellen door de toets **1** lang ingedrukt te houden op het startscherm.
- **Oproepdoorschakeling:** stel automatische doorschakeling in. Standaard staat dit uit. Druk op **OK** om de volgende opties te openen:
 - **Altijd doorschakelen** (status en nummer instellen)
 - **Wanneer in gesprek** (status en nummer instellen)



- **Wanneer onbeantwoord** (status en nummer instellen)
- **Wanneer onbereikbaar** (status en nummer instellen)
- **Aanvullende instellingen:**
 - **Nummerweergave:** stel in of je nummer wordt doorgestuurd. Opties: “Netwerkstandaard”, “Nummer verbergen”, “Nummer tonen”. Standaard: netwerkstandaard.
 - **Gesprek in wacht:** hoorbaar signaal bij een tweede oproep terwijl je al in gesprek bent. Standaard ingeschakeld.

Artikel 8: Contacten

Inleiding

De toepassing **Contacten** werkt als een telefoonboek waarin al je contacten zijn gegroepeerd. Het hoofdscherm laat je alle contacten zien die op de MiniVision2+ zijn opgeslagen. De contacten worden alfabetisch gesorteerd. Elk contact bevat de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer en type.

Contacten importeren

Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, wordt standaard geen enkel contact weergegeven op de MiniVision2+. Indien gewenst, kun je contacten importeren vanaf je **SIM-kaart** of vanuit een **VCF-bestand**.

Om dit te doen, druk je op **Menu** in het hoofdscherm van de Contacten-toepassing om de schermopties te openen. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toets om “Importeren” te selecteren en bevestig met de **OK**-toets. Er verschijnt een scherm met de volgende twee opties:

- **Importeren vanaf SIM-kaart:** kopieert alle contacten van je SIM-kaart naar het interne geheugen van de MiniVision2+. Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer “Ja” en bevestig met de **OK**-toets om de import te voltooien.
- **Importeren vanaf VCF-bestand:** kopieert alle contacten uit een VCF-bestand naar het interne geheugen van de MiniVision2+. Een VCF-bestand (of vCard) is een standaardformaat voor het opslaan van contactinformatie. Het is mogelijk om contactlijsten in VCF-formaat op te slaan vanuit de meeste contactbeheerprogramma's op een computer of telefoon.

Om deze functie te gebruiken, moet je eerst het VCF-bestand met je contacten kopiëren naar een micro-SD-kaart of naar het interne geheugen van de MiniVision2+. Om een kopie van je contacten in het interne geheugen van de MiniVision2+ te maken, verbind je de telefoon via de USB-kabel met je computer. De MiniVision2+ wordt herkend als een externe opslagruimte. Open de map “MiniVision2+” en daarna “Interne opslag” om toegang te krijgen tot het telefoongeheugen. Kopieer je VCF-bestand naar de hoofdmap van deze map.

Wanneer het bestand naar het interne geheugen van de MiniVision2+ is gekopieerd, druk je op de **OK**-toets om de import vanaf een VCF-bestand te bevestigen. Er verschijnt een scherm om een bestand te selecteren. Selecteer de naam van je VCF-bestand met de Omhoog- of Omlaag-toets en bevestig met de **OK**-toets. Een bevestigingsscherm verschijnt. Selecteer “Ja” en bevestig met de **OK**-toets om de import van de contacten te voltooien.



Goed om te weten: Tijdens het importeren verschijnt een scherm dat de voortgang in percentages toont. Wanneer het importeren is voltooid, informeert de MiniVision2+ je over het aantal geïmporteerde contacten.

Goed om te weten: De MiniVision2+ ondersteunt slechts één telefoonnummer per contact. Geïmporteerde contacten met meerdere telefoonnummers worden gedupliceerd met één nummer per contact en onderscheiden met het type nummer (Mobiel, Werk, Thuis, Overig).

Contact aanmaken

Vanaf het hoofdscherm van de Contacten-toepassing druk je op **Menu** en selecteer je “Nieuw contact” met de Omhoog- of Omlaag-toetsen en bevestig je met de **OK**-toets.

Er verschijnt een scherm voor het aanmaken van een contact met de volgende velden:

- **Voornaam:** hiermee kun je de voornaam van het contact invullen. Druk op **OK** om het invoerveld te openen, typ de naam en druk opnieuw op **OK** om de voornaam op te slaan en terug te keren naar het aanmaakscherm.
- **Achternaam:** hiermee kun je de achternaam van het contact invullen. Druk op **OK** om het invoerveld te openen, typ de achternaam en druk opnieuw op **OK** om de achternaam op te slaan en terug te keren naar het aanmaakscherm.
- **Nummer:** hiermee kun je het telefoonnummer van het contact invullen. Druk op **OK** om het invoerveld te openen, typ het nummer en druk opnieuw op **OK** om het telefoonnummer op te slaan en terug te keren naar het aanmaakscherm.

Goed om te weten: De MiniVision2+ ondersteunt slechts één telefoonnummer per contact. Heeft een contact meerdere nummers, dan moet je een tweede contact aanmaken met dezelfde voor- en achternaam, en alleen het **Nummer** en **Type** aanpassen.

- **Type:** hiermee kun je het type van het telefoonnummer instellen. Er zijn vier typen: **Mobiel, Werk, Thuis, Overig**. Standaard is **Mobiel** geselecteerd. Druk op **OK** om te wijzigen, gebruik Omhoog of Omlaag om een ander type te selecteren en bevestig met **OK**.
- **Notitie:** voegt een notitie toe aan je contact. Druk op **OK** om het invoerveld te openen, typ de notitie en druk opnieuw op **OK** om op te slaan en terug te keren naar het aanmaakscherm.
- **Beltoon:** hiermee kun je een aangepaste beltoon instellen voor het contact. Druk op **OK** om de beltoon te wijzigen. Gebruik Omhoog of Omlaag om een beltoon te selecteren. De geselecteerde beltoon wordt automatisch afgespeeld. Bevestig je keuze met **OK**. De beltoon wordt opgeslagen en het aanmaakscherm wordt opnieuw weergegeven.

Goed om te weten: Je kunt ook eigen MP3-beltunes toevoegen. Verbind de MiniVision2+ met je computer via USB. Open de map “MiniVision2+”, daarna “Interne opslag”, en kopieer je MP3-bestanden naar de map “Ringtones”. Deze beltonen worden daarna beschikbaar in de lijst en herkend aan de bestandsnaam van het MP3-bestand.

Wanneer alle velden zijn ingevuld, druk je op **Menu**, selecteer **Opslaan** met Omhoog of Omlaag en bevestig met **OK**.



Worldwide Vision

— see things different —

Goed om te weten: Druk op de **Terug**-toets om het contact op te slaan als ten minste één veld is ingevuld.

Goed om te weten: Alle contacten worden opgeslagen in het interne geheugen van de telefoon; het is niet mogelijk om ze op de SIM-kaart op te slaan.

Contact wijzigen

Vanaf het hoofdscherm van de Contacten-toepassing selecteer je het contact dat je wilt wijzigen met Omhoog of Omlaag en bevestig je met **OK**.

Het contact wordt geopend in de bewerkmodus. Gebruik Omhoog of Omlaag om het veld te selecteren dat je wilt wijzigen: **Voor naam, Achternaam, Nummer, Type, Notitie, Beltoon**. Volg daarna dezelfde procedure als bij **Contact aanmaken**.

Na het bewerken druk je op **Menu**, selecteer **Opslaan** en bevestig met **OK**.

Goed om te weten: Druk op de **Terug**-toets om het contact op te slaan als ten minste één veld is gewijzigd.

Om de wijzigingen te annuleren, druk op **Menu**, selecteer **Annuleren** en bevestig met **OK**.

Contact verwijderen

Vanaf het hoofdscherm van de Contacten-toepassing selecteer je het contact dat je wilt verwijderen en bevestig je met **OK**. Het contact wordt geopend in de bewerkmodus. Druk op **Menu**, selecteer **Verwijderen** en bevestig met **OK**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer **Ja** om te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Alle contacten verwijderen

Om alle contacten te verwijderen, druk je op **Menu** in het hoofdscherm van de Contacten-toepassing, selecteer **Alles verwijderen** en bevestig met **OK**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer **Ja** om alle contacten te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Contact zoeken

Vanaf het hoofdscherm van de Contacten-toepassing gebruik je het alfanumerieke toetsenbord om de naam van een contact te typen. De lijst wordt tijdens het typen gefilterd. Het filter wordt toegepast op het begin van de Voor- en Achternaam.

Je kunt door de gefilterde lijst bladeren met Omhoog of Omlaag. Om een teken uit het filter te wissen, druk je op de **Terug**-toets.



Wanneer het contact is gevonden, druk je op **OK** om de contactgegevens te bekijken.

Contact bellen

Het wordt aangeraden om de toepassing **Telefoon** te gebruiken om een contact te bellen. Je kunt echter ook direct vanuit Contacten bellen.

Selecteer het contact dat je wilt bellen met Omhoog of Omlaag en druk op **OK**. Het contact wordt geopend in bewerkmodus. Druk op **Menu**, selecteer **Bellen** en bevestig met **OK**. Gebruik de **Oproep beëindigen**-toets om het gesprek te beëindigen en terug te keren naar de toepassing Contacten.

Bericht naar contact sturen

Het wordt aangeraden om de toepassing **Berichten** te gebruiken. Je kunt echter ook vanuit Contacten een bericht sturen.

Selecteer het contact en druk op **OK**. Druk op **Menu**, selecteer **Tekstbericht verzenden** en bevestig met **OK**. Je wordt doorgestuurd naar de Berichten-toepassing om de ontvanger te bevestigen of een nummer in te voeren. Typ je bericht en druk op **OK** om te verzenden en terug te keren naar Contacten.

Contact delen via sms

Selecteer het contact dat je wilt delen en druk op **OK**. Druk op **Menu**, selecteer **Contact verzenden via sms** en bevestig met **OK**.

Selecteer de ontvanger van het bericht met Omhoog of Omlaag en bevestig met **OK**. Je wordt doorgestuurd naar de Berichten-toepassing met een vooraf ingevuld bericht met de contactgegevens. Druk op **OK** om te verzenden en terug te keren naar Contacten.

Contacten exporteren

Vanaf het hoofdscherm van de Contacten-toepassing druk je op **Menu**, selecteer **Exporteren naar VCF-bestand** en bevestig met **OK**.

Een kopie van je contacten wordt nu opgeslagen in het interne geheugen van de MiniVision2+. Dit VCF-bestand heet **00X.VCF** (waarbij X het aantal reeds gemaakte back-ups is) en kan op je computer worden opgeslagen.

Artikel 9: Berichten

Inleiding

De toepassing **Berichten** stelt je in staat om tekstberichten (SMS) en multimedieberichten (MMS) te verzenden en ontvangen, inclusief afbeeldingen, contacten of langere teksten.

Het hoofdscherm van de Berichten-toepassing toont alle berichten die naar de MiniVision2+ zijn verzonden en ontvangen. Er zijn twee weergavemodi beschikbaar:



- **Discussiemodus:** groepeert berichten per discussie. Dit betekent dat alle berichten die met een contact zijn verzonden en ontvangen, worden gebundeld in één map genaamd *Discussie*. Wanneer je een discussie opent, heb je toegang tot de volledige geschiedenis van je uitwisselingen.
- **Chronologische modus:** groepeert berichten per categorie. Dit betekent dat alle verzonden en ontvangen berichten worden onderverdeeld in specifieke mappen: ontvangen berichten, verzonden berichten, niet-verzonden berichten en concepten. Wanneer je een map opent, zie je alleen berichten van een bepaald type in chronologische volgorde, bijvoorbeeld ontvangen berichten in de map *Inbox*.

Standaard is de **Discussiemodus** actief.

Om de weergavemodus van berichten te wijzigen:

1. Druk op **Menu**.
2. Gebruik de Omhoog- of Omlaag-toetsen om **Instellingen** te selecteren en bevestig met **OK**.
3. In het instellingenmenu gebruik je opnieuw Omhoog of Omlaag om **Berichtweergavemodus** te selecteren en bevestig met **OK**.
4. Gebruik Omhoog of Omlaag om te kiezen tussen **Discussie** of **Chronologisch** en bevestig met **OK**.

In de rest van de handleiding wordt de werking van de Berichten-toepassing eerst uitgelegd in **Discussiemodus** en daarna in **Chronologische modus**.

Artikel 10: Berichten beheren in Gespreksmodus

Introductie

Wanneer u een bericht voor de eerste keer verzendt, maakt MiniVision2+ automatisch een gesprek aan waarin alle uitwisselingen met dit contact worden gegroepeerd. Op dezelfde manier wordt een nieuw gesprek aangemaakt wanneer een correspondent u voor het eerst een bericht stuurt. Wanneer u een bericht van een correspondent beantwoordt, wordt uw bericht opgeslagen in het gesprek dat aan dat contact is gekoppeld. Standaard is de naam van het gesprek de naam van het contact, als de afzender deel uitmaakt van uw contacten; anders wordt het gesprek genoemd met het telefoonnummer. Gesprekken worden in chronologische volgorde weergegeven, met het meest recente bovenaan de lijst.

Nieuw bericht verzenden

Vanaf het hoofdscherm van de Berichten-applicatie, druk op **Menu** en selecteer “Nieuw bericht” met de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen en bevestig met de **OK**-knop. Er verschijnt een scherm om een contact te selecteren. Twee opties zijn beschikbaar:

- **Contacten:** hiermee kunt u een contact uit uw telefoonboek selecteren. Gebruik de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen om een contact uit de lijst te kiezen en druk op **OK** om te bevestigen.
Goed om te weten: net als in de Contacten- en Telefoon-applicaties kunt u het alfanumerieke toetsenbord gebruiken om uw contact te vinden. De lijst met namen wordt



tijdens het typen gefilterd op het begin van de voor- en achternaam. U kunt de gefilterde lijst op elk moment doorlopen met de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen. Druk op **Back** om een teken uit het filter te verwijderen. Zodra het contact is gevonden, druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

- **Nummer draaien:** hiermee kunt u een telefoonnummer cijfer voor cijfer invoeren. Er verschijnt een bewerkveld, typ uw nummer met het numerieke toetsenbord en bevestig met **OK**.

Nadat uw correspondent is geselecteerd, verschijnt een scherm om uw bericht in te voeren. Typ uw tekst met het fysieke toetsenbord of spraakherkenning en bevestig met **OK**.

MiniVision2+ keert terug naar het hoofdscherm van het gesprek dat u zojuist hebt gemaakt. Het gesprek staat bovenaan de lijst omdat het de meest recente wordt.

Bericht naar meerdere ontvangers verzenden

Volg dezelfde procedure als bij het verzenden van een bericht. Wanneer het bewerkveld verschijnt, druk op **Menu** om de opties te openen. Gebruik de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen om "Ontvangerlijst" te selecteren en bevestig met **OK**.

De lijst met ontvangers verschijnt. Selecteer een ontvanger en druk op **OK** om deze te verwijderen, of druk op **Menu** en selecteer "Ontvanger toevoegen" om een nieuwe ontvanger toe te voegen. Druk op **Back** om terug te keren naar het bewerkveld en voer uw bericht in.

Bericht doorsturen

U kunt een bericht van het ene gesprek naar een ander van uw contacten doorsturen. Gebruik de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen om het gesprek te selecteren dat het bericht bevat dat u wilt doorsturen en druk op **OK**.

Het berichtgeschiedenis verschijnt. Selecteer met de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen het bericht dat u wilt doorsturen en druk op **OK** om de opties van dat bericht te openen. Selecteer "Doorsturen" en bevestig met **OK**.

Het scherm voor contactselectie verschijnt. Kies het contact waaraan u het bericht wilt doorsturen of voer het nummer direct in. Nadat het contact is geselecteerd, verschijnt een bewerkveld met het doorgestuurde bericht. Bevestig het doorsturen met **OK**.

Goed om te weten: u kunt het doorgestuurde bericht bewerken of extra tekst toevoegen voordat u het verzendt.

Nieuwe berichten lezen

Het aantal nieuwe berichten op MiniVision2+ wordt weergegeven op het startscherm en in de applicatielijst bij het selecteren van "Berichten". De optie **Wake up Speech** laat het aantal nieuwe berichten ook aankondigen bij het verlaten van de slaapstand. Zie de sectie **Vocalization in Instellingen** voor meer informatie.



Gebruik de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen om het gesprek te selecteren dat nieuwe berichten bevat. De informatie “Ongelezen” en het aantal nieuwe berichten wordt aangekondigd bij het selecteren van een gesprek. Druk op **OK** om het gesprek te openen en de geschiedenis van ontvangen en verzonden berichten te bekijken.

Berichten zijn chronologisch gerangschikt: het eerste bericht in de lijst is het laatst ontvangen of verzonden bericht. Gebruik de **Omhoog**- of **Omlaag**-knoppen om te navigeren. Ontvangen en verzonden berichten hebben het volgende formaat: Status (Verzonden, Gelezen of Ongelezen), Datum, Tijd, Berichtinhoud en bijgevoegde bestanden voor MMS.

Goed om te weten: meldingen van nieuwe berichten verdwijnen wanneer u het bericht selecteert (status verandert van “Ongelezen” naar “Gelezen”).

Goed om te weten: de optie “Markeer alle berichten als gelezen” in het **Menu** verwijdert de “Ongelezen”-indicator van alle ontvangen berichten.

Berichttekst weergeven

MiniVision2+ kan de berichttekst groter weergeven en door de tekst navigeren per teken of per woord. Selecteer een bericht en druk op **OK** om de beschikbare opties te zien. Gebruik **Omlaag** om “Weergeven” te selecteren en bevestig met **OK**.

De tekst wordt bovenaan het scherm weergegeven, terwijl het woord vóór de cursor onderaan staat. Beschikbare acties:

- **Omlaag:** wissel tussen navigatie per woord of per teken. Standaard is Word.
- **Omhoog:** lees de volledige tekst en kondig de huidige cursorpositie en navigatiemodus aan.
- **Korte druk links/rechts:** beweeg de cursor per woord of teken afhankelijk van de navigatiemodus.
- **Lange druk links/rechts:** beweeg de cursor naar het begin of einde van de tekst.
- **Back:** verlaat de weergavemodus.
- **Menu:** open “Sluiten” of “Alles kopiëren”.

Bijlagen in een bericht bekijken (MMS)

MiniVision2+ kan bijlagen ontvangen (afbeelding of contactkaart). Bij ingeschakelde vocalisatie wordt het aantal bijlagen aangekondigd. Andere formaten zoals video of tekstbestand kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen.

Selecteer het bericht en druk op **OK**, kies “Bijlage”:

- **Afbeelding:** wordt weergegeven. Om op te slaan, druk op **OK** en selecteer “Opslaan”.
- **Contact VCF:** MiniVision2+ stelt voor het contact te importeren. Selecteer “Ja” om te bevestigen.
- **Andere formaten:** opslaan in de map **Download**.

Goed om te weten: bij meerdere bijlagen wordt een lijst weergegeven. Gebruik **Omhoog/Omlaag** om een item te selecteren en **OK** om de actie uit te voeren.

Antwoorden op een bericht



Worldwide Vision

— see things different —

Selecteer het gesprek en druk op **OK**. Selecteer “Beantwoorden” en bevestig met **OK**. Er verschijnt een nieuw bewerkveld; typ uw bericht en bevestig met **OK**. Het bericht verschijnt bovenaan het gesprek als meest recent.

Bericht verwijderen uit een gesprek

Selecteer het bericht, druk op **Menu** → “Verwijderen” → **OK**. Bevestig met **Ja** om te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Gesprek verwijderen

Selecteer het gesprek, druk op **Menu** → “Gesprek verwijderen” → **OK**. Bevestig met **Ja** om te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Alle gesprekken verwijderen

Selecteer **Menu** → “Alles verwijderen” → **OK**. Bevestig met **Ja** om alle gesprekken te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Contact maken van onbekend nummer

Selecteer het gesprek met onbekend nummer, druk op **OK** → “Toevoegen aan contact” → **OK**. Volg de procedure **Contact aanmaken**.

Contact bellen vanuit berichten

Selecteer het gesprek, druk op **OK** → “Bellen” → **OK** om het gesprek te starten.

Instellingen

Selecteer **Menu** → “Instellingen” → **OK**. Mogelijke opties:

- **Berichtstructuur:** gespreksmodus of chronologische modus.
- **Bezorgrapport:** wijzig “Bericht verzonden” naar “Bericht afgeleverd”.
- **Meldingen:** instellen van geluid, trilling, geluid + trilling of geen melding.
- **SMS-servicecentrum:** instellen van hostnummer voor sms-verzending.
- **Draadloze noodmeldingen:** configuratie van noodmeldingen (WEA).

Goed om te weten: u kunt eigen meldingsgeluiden toevoegen door MiniVision2+ aan te sluiten op een computer en MP3-bestanden te kopiëren naar de map **Notifications**.



SMS (tekstbericht) servicecentrum

Met deze optie kunt u het hostnummer instellen voor het ontvangen of verzenden van tekstberichten. Standaard wordt dit nummer automatisch ingevuld op basis van uw provider wanneer de SIM-kaart in de MiniVision2+ wordt geplaatst. Druk op **OK** als u dit nummer wilt wijzigen of corrigeren.

Draadloze noodmeldingen

Met deze optie kunt u de ontvangst van noodmeldingen configureren bij gevaar (activering, type waarschuwing, herinnering, enz.).

Goed om te weten: Wireless Emergency Alert (WEA) is een systeem voor openbare veiligheid dat bevoegde instanties in staat stelt tekstachtige berichten te sturen naar gebruikers met geschikte mobiele apparaten om hen te waarschuwen voor noodsituaties in hun omgeving. Deze functie wordt per land geïmplementeerd (neem contact op met uw netwerkprovider als WEA deel uitmaakt van hun aanbod).

Berichten beheren in Chronologische modus

In de Chronologische modus worden berichten verdeeld in 4 mappen:

- **Inbox (Postvak IN):** bevat berichten die uw correspondenten u hebben gestuurd.
- **Verzonden:** bevat berichten die u aan uw correspondenten hebt gestuurd.
- **Outbox (Uitgaand):** bevat berichten die niet konden worden verzonden (bijvoorbeeld door netwerkproblemen of verkeerd telefoonnummer).
- **Concept:** bevat berichten die zijn getypt maar nog niet verzonden.

Standaard toont het hoofdscherm van Berichten alleen ontvangen berichten.

Om van categorie te wisselen, druk op **Menu**, selecteer met **Omhoog** of **Omlaag** en bevestig met **OK**.

In elke categorie zijn berichten chronologisch gesorteerd, met het meest recente bovenaan. Elk bericht heeft het volgende formaat: Status (verzonden bericht, gelezen bericht, ongelezen bericht, conceptbericht of verzendend bericht), Contactnaam (of telefoonnummer als onbekend), Datum, Tijd en Berichtinhoud.

Nieuw bericht verzenden

Vanaf het hoofdscherm van Berichten en vanuit elke categorie, druk op **Menu**, selecteer **Nieuw bericht** met **Omhoog** of **Omlaag** en bevestig met **OK**.

Het scherm voor contactselectie verschijnt. Twee opties zijn beschikbaar:

- **Contact:** selecteer een contact uit uw telefoonboek. Gebruik **Omhoog** of **Omlaag** om een contact te kiezen en druk op **OK**.



Goed om te weten: net als in de Contacten- en Telefoon-applicaties kunt u het alfanumerieke toetsenbord gebruiken om uw contact te vinden. De lijst wordt tijdens het typen gefilterd op begin van voor- en achternaam. U kunt de gefilterde lijst doorlopen met **Omhoog/Omlaag**. Druk op **Back** om een teken te verwijderen. Bevestig met **OK** zodra het contact is gevonden.

- **Nummer draaien:** voer een telefoonnummer cijfer voor cijfer in, typ het in het bewerkveld en bevestig met **OK**.

Vervolgens verschijnt een bewerkveld om het bericht in te voeren. Typ uw bericht met het toetsenbord of spraakherkenning en bevestig met **OK**. Het bericht wordt verzonden en MiniVision2+ keert terug naar het hoofdscherm van Berichten met de **Inbox** zichtbaar.

Bericht naar meerdere ontvangers verzenden

Volg dezelfde procedure als hierboven. Wanneer het bewerkveld verschijnt, druk op **Menu**, selecteer **Ontvanger toevoegen** en bevestig met **OK**. Kies een contact of voer een nummer in. Het bewerkveld verschijnt opnieuw. Herhaal om extra ontvangers toe te voegen. Bevestig met **OK**. Na verzending keert MiniVision2+ terug naar het **Inbox**-scherm.

Bericht doorsturen

Selecteer het bericht dat u wilt doorsturen, druk op **OK** → **Doorsturen** → **OK**. Kies het contact of voer een nummer in. Een bewerkveld verschijnt met het bericht; bevestig met **OK**. MiniVision2+ keert terug naar de **Inbox**.

Goed om te weten: u kunt het bericht bewerken of extra tekst toevoegen voordat u verzendt.

Nieuwe berichten lezen

Het aantal nieuwe berichten wordt weergegeven op het startscherm en in de app-lijst bij **Berichten**. De optie **Wake up Speech** kan nieuwe berichten aankondigen bij het verlaten van slaapstand.

Standaard toont Berichten de lijst met nieuwe berichten. Gebruik **Omhoog/Omlaag** om door de lijst te navigeren. Nieuwe berichten staan bovenaan.

Goed om te weten: meldingen verdwijnen zodra u het bericht opent (status verandert van **Ongelezen** naar **Gelezen**).

Goed om te weten: Markeer alle berichten als gelezen verwijdert de **Ongelezen**-indicator.

Berichttekst weergeven

Selecteer een bericht → **OK** → **Weergeven** → **OK**. De tekst wordt bovenaan weergegeven, het woord voor de cursor onderaan.

Acties:

- **Omlaag:** wissel tussen navigatie per woord of teken.
- **Omhoog:** lees de volledige tekst en kondig cursorpositie en navigatiemodus aan.
- **Links/Rechts kort:** beweeg per woord of teken.
- **Links/Rechts lang:** naar begin of einde van tekst.



Worldwide Vision

— see things different —

- **Back:** verlaat weergavemodus.
- **Menu:** open **Sluiten** of **Alles kopiëren**.

Bijlagen in een bericht bekijken (MMS)

Selecteer bericht → **OK** → **Bijlage**.

- **Afbeelding:** weergeven; opslaan via **OK** → **Opslaan**.
- **Contact VCF:** importeren in telefoonboek → **Ja**.
- **Andere formaten:** opslaan in **Download** → **Ja**.

Goed om te weten: bij meerdere bijlagen verschijnt een lijst. Selecteer item en druk **OK**.

Antwoorden op een bericht

Selecteer bericht → **OK** → **Beantwoorden** → **OK**. Typ bericht en bevestig met **OK**. Na verzending keert MiniVision2+ terug naar **Inbox**.

Bericht verwijderen

Selecteer bericht → **OK** → **Verwijderen** → **OK**. Bevestig **Ja** of **Nee**. Keer terug naar **Inbox**.

Alle berichten verwijderen

Menu → **Alles verwijderen** → **OK** → **Ja/Nee**. Bevestig. Keer terug naar **Inbox**.

Contact maken van onbekend nummer

Selecteer bericht → **OK** → **Toevoegen aan contact** → **OK**. Volg **Contact aanmaken**-procedure.

Contact bellen vanuit Berichten

Selecteer bericht → **OK** → **Bellen** → **OK**. Het gesprek wordt gestart.

Instellingen

Menu → **Instellingen** → **OK**. Opties:

- **Berichtstructuur:** Gespreksmodus of Chronologische modus.
- **Bezorgrapport:** wijzig "Verzonden" naar "Afgeleverd".
- **Meldingen:** Mode, Geluid, Trilling of Geluid + Trilling.
- **SMS-servicecentrum:** stel hostnummer in.
- **Draadloze noodmeldingen (WEA):** configuratie van noodmeldingen.

Goed om te weten: u kunt eigen meldingsgeluiden toevoegen via USB (kopieer MP3 naar **Notifications**).



Artikel 11: Alarm Introductie

De Alarm-applicatie stelt u in staat om uw verschillende alarmen en herinneringen te beheren. Het hoofdscherm van de Alarm-app toont alle alarmen die op de MiniVision2+ zijn aangemaakt.

Alarmen worden chronologisch gesorteerd. Elk aangemaakt alarm heeft het volgende formaat: tijd van het alarm, status van het alarm (ingeschakeld/uitgeschakeld), herhaling van het alarm (indien geactiveerd, selecteer de dagen van de week waarop het alarm moet afgaan).

Standaard zijn twee alarmen vooraf ingesteld:

- 08:30 – Uitgeschakeld – maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
- 09:30 – Uitgeschakeld – zaterdag, zondag

U kunt deze alarmen bewerken, verwijderen of nieuwe alarmen aanmaken.

De optie **Wake up Speech** kan het volgende actieve alarm aankondigen bij het verlaten van de slaapstand. Zie de sectie «Vocalisatie» in **Instellingen** voor meer informatie.

Alarm toevoegen

Vanaf het hoofdscherm van de Alarm-app, druk op **Menu** → **Alarm toevoegen** → bevestig met **OK**.

Er verschijnt een scherm om het alarm aan te maken. Vul de volgende velden in:

- **Status (Ingeschakeld / Uitgeschakeld):** toont of het alarm geactiveerd is. Standaard is een nieuw alarm **Ingeschakeld**. Selecteer **OK** om de status te wijzigen of uit te schakelen.
- **Tijd:** stelt de tijd van het alarm in. Standaard wordt het huidige tijdstip gebruikt, afgerond op 5 minuten. Druk op **OK** om te wijzigen. Selecteer eerst het uur met **Omhoog/Omlaag** → **OK**, daarna de minuten → **OK**. Tijd wordt opgeslagen.
- **Beltoon:** stelt de beltoon van het alarm in. Standaard is de bel **Cesium** geselecteerd. Druk op **OK** om te wijzigen. Gebruik **Omhoog/Omlaag** om een toon te kiezen; deze wordt automatisch kort afgespeeld. Bevestig met **OK**.
Goed om te weten: u kunt eigen alarmtonen toevoegen door de MiniVision2+ via USB aan de computer te koppelen. Open de map **MiniVision2+ → Internal Storage Memory → Alarms** en kopieer MP3-bestanden. Ze verschijnen dan in de beltonenlijst.
- **Herhalen:** definieert herhaling van het alarm in de week. Standaard is geen herhaling ingesteld, wat betekent dat het alarm slechts één keer afgaat. U kunt de herhaling instellen voor specifieke dagen of de hele week. Druk op **OK** → selecteer de dag(en) met **Omhoog/Omlaag** → **OK**. Druk op **Back** om terug te keren naar het aanmaakscherm.

Wanneer alle velden zijn ingevuld, druk op **Menu** → **Opslaan** → **OK**. Een bevestigingsbericht toont wanneer het volgende alarm gepland staat.

Goed om te weten: Drukken op **Back** slaat het alarm ook op als minstens één veld is ingevuld.

Alarm stoppen



Wanneer een alarm afgaat, verschijnt een scherm met de opties:

- **Tijd:** toont de tijd van het afgaande alarm.
- **Stop:** stopt het alarm.
- **Snooze:** stopt het alarm en laat het 10 minuten later opnieuw afgaan.

Selecteer **Stop** of **Snooze** met **Omhoog/Omlaag** → bevestig met **OK**.

Drukken op **Back** stopt het alarm ook.

Goed om te weten: de MiniVision2+ moet aanstaan of in slaapstand staan om het alarm af te laten gaan. Staat het toestel uit, dan gaat het alarm niet af.

Alarm bewerken

Selecteer vanaf het hoofdscherm het alarm → **OK**.

Het alarm opent in bewerkmodus. Selecteer met **Omhoog/Omlaag** het veld dat u wilt wijzigen: Status, Tijd, Beltoon en/of Herhaling. Volg dezelfde procedure als bij **Alarm toevoegen**.

Na bewerken: **Menu** → **Opslaan** → **OK**.

Goed om te weten: Drukken op **Back** slaat het alarm ook op als minstens één veld is gewijzigd.

Om wijzigingen te annuleren: **Menu** → **Annuleren** → **OK**.

Alarm in- of uitschakelen

Selecteer vanaf het hoofdscherm het alarm → **OK**.

Selecteer **Ingeschakeld / Uitgeschakeld** → **OK** om de status te wijzigen.

Druk op **Back** om de wijziging op te slaan.

Alarm verwijderen

Selecteer vanaf het hoofdscherm het alarm → **OK**.

Menu → **Verwijderen** → **OK** → bevestig met **Ja** om te verwijderen of **Nee** om te annuleren.

Alle alarmen verwijderen

Menu → **Alles verwijderen** → **OK** → **Ja/Nee**. Bevestig. Alle alarmen worden verwijderd of de actie wordt geannuleerd.

Standaard beltoon instellen

Vanaf het hoofdscherm van de Alarm-app, druk op **Menu** → **Standaard beltoon** → **OK**.

Selecteer een beltoon uit de lijst met **Omhoog/Omlaag** → **OK**.



Artikel 12: Kalender Introductie

De Kalender-applicatie stelt u in staat om uw verschillende afspraken en evenementen te beheren. Het hoofdscherm van de Kalender toont alle evenementen die op de MiniVision2+ zijn aangemaakt.

Evenementen worden chronologisch gesorteerd. Elk aangemaakt evenement heeft het volgende formaat: naam van het evenement, datum van het evenement, tijd van het evenement. Standaard is er geen evenement aangemaakt.

De optie **Wake up Speech** kan het volgende evenement aankondigen bij het verlaten van de slaapstand. Zie de sectie «Vocalisatie» in **Instellingen** voor meer informatie.

Evenement toevoegen

Vanaf het hoofdscherm van de Kalender-app, druk op **Menu → Nieuw evenement → OK**. Er verschijnt een scherm om het evenement aan te maken. Vul de volgende velden in:

- **Titel:** geef een naam aan het evenement. Standaard is dit leeg. Druk op **OK** → voer de tekst in → **OK** om te bevestigen en terug te keren naar het aanmaakscherm.
- **Datum:** stel de datum van het evenement in. Standaard is dit de huidige datum. Druk op **OK** om te wijzigen. Selecteer eerst het jaar → **OK**, daarna de maand → **OK**, en vervolgens de dag → **OK**. De datum wordt opgeslagen.
- **Tijd:** stel de tijd van het evenement in. Standaard wordt de huidige tijd gebruikt, afgerond op 5 minuten. Druk op **OK** → selecteer uur → **OK**, daarna minuten → **OK**. De tijd wordt opgeslagen.
- **Herhaling:** definieer de herhaling van het evenement. Standaard is **Eenmaal** geselecteerd. U kunt het evenement zo instellen dat het dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks herhaalt. Druk op **OK** → selecteer herhaling (Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks) → **OK**.
Goed om te weten: een evenement met herhaling wordt automatisch gedupliceerd voor elke geselecteerde herhaling.
- **Herinnering:** stel in wanneer het evenement moet worden herinnerd. Er zijn acht opties: **Geen, Op tijd, 5 minuten eerder, 10 minuten eerder, 30 minuten eerder, 1 uur eerder, De dag ervoor, 2 dagen eerder**. Standaard is **Op tijd** geselecteerd. Druk op **OK** → selecteer een andere waarde → **OK**.
- **Beltoon:** stel de beltoon van het evenement in. Druk op **OK** → selecteer een beltoon met **Omhoog/Omlaag**, deze wordt automatisch kort afgespeeld → **OK**.
Goed om te weten: u kunt eigen beltonen toevoegen via USB: **MiniVision2+ → Internal Storage Memory → Ringtones**, kopieer MP3-bestanden. Ze verschijnen in de lijst en worden weergegeven met de bestandsnaam.

Wanneer alle velden zijn ingevuld: **Menu → Opslaan → OK**.

Goed om te weten: Drukken op **Back** slaat het evenement ook op als minstens één veld is ingevuld.

Alarm van een evenement stoppen

Wanneer het alarm van een evenement afgaat, verschijnt een scherm met:



Worldwide Vision

— see things different —

- **Titel:** toont de naam van het evenement
- **Stop:** stopt het alarm
- **Snooze:** stopt het alarm en laat het 10 minuten later opnieuw afgaan

Selecteer **Stop** of **Snooze** → **OK**. Druk op **Back** om het alarm ook te stoppen.

Goed om te weten: de MiniVision2+ moet aanstaan of in slaapstand staan. Staat het toestel uit, dan gaat het alarm niet af.

Evenement bewerken

Selecteer vanaf het hoofdscherm het evenement → **OK**.

Het evenement opent in bewerkmodus. Selecteer met **Omhoog/Omlaag** het veld dat u wilt wijzigen: titel, datum, tijd, herhaling, herinnering, beltoon. Volg dezelfde procedure als bij **Evenement toevoegen**.

Na bewerken: **Menu** → **Opslaan** → **OK**.

Goed om te weten: Drukken op **Back** slaat het evenement ook op als minstens één veld is gewijzigd. Om wijzigingen te annuleren: **Menu** → **Annuleren** → **OK**.

Evenement verwijderen

Selecteer vanaf het hoofdscherm het evenement → **OK**.

Menu → **Verwijder evenement** → **OK** → **Ja/Nee**. Bevestig of annuleer.

Alle evenementen verwijderen

Menu → **Alles verwijderen** → **OK** → **Ja/Nee**. Bevestig of annuleer.

Goed om te weten: het verwijderen van een evenement met herhaling verwijdert automatisch alle duplicaten.

Standaard beltoon instellen

Vanaf het hoofdscherm van de Kalender-app: **Menu** → **Standaard beltoon** → **OK**.

Selecteer een beltoon → **OK**.

Evenement zoeken

Vanaf het hoofdscherm van de Kalender-app, gebruik het alfanumerieke toetsenbord om de naam van het evenement in te voeren. De lijst wordt tijdens het typen gefilterd.

Blader door de gefilterde lijst met **Omhoog/Omlaag**.

Druk op **Back** om een teken uit de filter te verwijderen.

Selecteer het evenement → **OK** om de details te bekijken.

Goed om te weten: de MiniVision2+ toont evenementen over een rollend jaar. Evenementen buiten deze periode worden niet weergegeven.



Artikel 13: Camera Introductie

De Camera-applicatie stelt u in staat om foto's te maken met de camera aan de achterkant van de MiniVision2+.

Een foto maken

Bij het openen van de Camera-applicatie wordt het camerabeeld op het scherm weergegeven. Er klinkt elke 3 seconden een pieptoon om aan te geven dat de camera is ingeschakeld.

Richt de camera op het object of de scène die u wilt vastleggen en druk op **OK** om de foto te maken. Er klinkt een karakteristiek geluid zodra de foto is genomen.

De foto wordt automatisch opgeslagen in de interne geheugen van de MiniVision2+ in de map **DCIM**. De foto kan vervolgens worden bekeken in de **Galerij**-applicatie.

Goed om te weten:

- Met de **Menu**-knop in de Camera-app heeft u directe toegang tot de **Galerij** om uw foto's te bekijken.
- Als u een SD-kaart in de MiniVision2+ plaatst, worden gemaakte foto's automatisch op de SD-kaart opgeslagen.
- De pieptoon van elke 3 seconden kan worden uitgeschakeld via **Instellingen → Vocalisatie → Speel geluid bij activering camera/LED**.

Artikel 14: Galerij Introductie

De Galerij-applicatie stelt u in staat om foto's te bekijken die u met uw MiniVision2+ heeft gemaakt, of foto's van ontvangen berichten (MMS) die u heeft opgeslagen.

Elke foto in de Galerij wordt vocaliseert met de volgende informatie: **Titel van de foto + Datum van de foto (dag / maand / jaar / uur / minuut / seconde)**.

Standaard hebben foto's die met de Camera-app zijn gemaakt geen titel. Foto's worden chronologisch gesorteerd, van nieuw naar oud.

Een foto bekijken

Bij het openen van de Galerij-app wordt de laatst gemaakte of opgeslagen foto weergegeven. Gebruik **Omhoog** en **Omlaag** om door de lijst van opgeslagen foto's te bladeren.

Tijdens het bekijken van een foto kunt u het numerieke toetsenbord gebruiken voor de volgende acties:

- **1:** Uitzoomen (8 niveaus)
- **3:** Inzoomen (8 niveaus)



Worldwide Vision

— see things different —

- **2:** Scrollen omhoog
- **4:** Scrollen naar links
- **6:** Scrollen naar rechts
- **8:** Scrollen omlaag

Goed om te weten: het zoomniveau wordt gereset bij het wisselen van foto's met **Omhoog/Omlaag**.

Foto zoeken op datum

Druk in de lijst van foto's op **Menu → Zoeken → OK**.

Selecteer met **Omhoog/Omlaag** de datum van de foto (gesorteerd per maand) → **OK**.

MiniVision2+ toont vervolgens de foto's die op de geselecteerde datum zijn gemaakt.

Een foto hernoemen

Selecteer een foto uit de lijst → **OK → Hernoemen → OK**.

Voer de nieuwe naam in via het fysieke toetsenbord of spraakherkenning → **OK** om te bevestigen.

MiniVision2+ bevestigt dat de foto is hernoemd.

Een foto verzenden via MMS

Selecteer een foto → **OK → Verzenden → OK**.

Kies de ontvanger:

- **Contacten:** selecteer een contact uit uw telefoonboek → **OK**
- **Nummer bellen:** voer een telefoonnummer in → **OK**

Voer optioneel een bericht in → **OK** om de MMS met de foto te verzenden en terug te keren naar de Galerij.

Details van een foto

Selecteer een foto → **OK → Details → OK**.

Een venster verschijnt met:

- **Titel van de foto**
- **Datum van de foto**
- **Bestand:** opslaglocatie en bestandsnaam

Druk op **terug** om terug te keren naar de lijst van foto's.

Een foto verwijderen

Selecteer een foto → **OK → Verwijderen → OK → Ja/Nee**.

Bevestig of annuleer het verwijderen.

Alle foto's verwijderen



Druk op **Menu** → **Alles verwijderen** → **OK** → **Ja/Nee**.
Bevestig of annuleer het verwijderen van alle foto's.

Artikel 15: FM Radio

Introductie

De FM Radio-applicatie stelt u in staat om naar radiostations in uw omgeving te luisteren.

Radio luisteren

Sluit de oortelefoon aan op de rechterzijde van de MiniVision2+. Deze fungeert als antenne om het FM-signaal op te vangen.

- **OK-knop:** pauzeert of hervat de radio
- **Omhoog-knop:** selecteert de volgende frequentie (stap van 0,1 MHz)
- **Omlaag-knop:** selecteert de vorige frequentie (stap van 0,1 MHz)

Goed om te weten: Lang ingedrukt houden van **Omhoog** selecteert automatisch het volgende station, lang ingedrukt houden van **Omlaag** selecteert het vorige station.

Een radiostation toevoegen aan favorieten

Bij het luisteren naar de FM-radio kunt u een cijferknop (1 t/m 9) ingedrukt houden om het huidige radiostation toe te voegen aan uw favorieten.

Een korte druk op een van de cijferknoppen brengt u snel terug naar een van de opgeslagen favorieten.

Gebruik de **Menu**-knop om FM-radioopties te openen:

- **Favorieten:** toegang tot uw favoriete stations. Gebruik **Omhoog/Omlaag** om te scrollen en **OK** om af te spelen.
- **Audio naar luidspreker / oortelefoon schakelen:** schakelt het geluid tussen luidspreker en oortelefoon.

Goed om te weten: Wanneer u naar de radio luistert en de MiniVision2+ in de standby-modus gaat (zie hoofdstuk "Standby"), blijft de radio actief. Om het station te wijzigen, het volume aan te passen, of de weergave te pauzeren of te stoppen, drukt u eerst op de **Ophangen**-knop om de telefoon te activeren.

Artikel 16: Lichtsensor

Introductie

Deze applicatie meldt het helderheidsniveau dat wordt gedetecteerd door de camerasensor aan de bovenkant van de achterkant van de MiniVision2+.

Hoe het helderheidsniveau detecteren?



Richt de achterkant van de telefoon in de gewenste richting.

- In een lichte omgeving genereert de MiniVision2+ geluiden met een hoge frequentie.
- In een donkere omgeving genereert de MiniVision2+ geluiden met een lagere frequentie.

U kunt het meldingsniveau wijzigen via **Menu**:

- **Vocalisatie**: geeft het percentage gedetecteerd licht vocaal aan.
- **Geluid** (standaard): speelt een geluidssignaal dat overeenkomt met het percentage licht.

Artikel 17: Kleurdetectie

Introductie

De Kleurdetectie-applicatie stelt u in staat om de MiniVision2+ te gebruiken voor kleurherkenning en detectie.

Bij het openen van de applicatie zijn drie opties beschikbaar:

Kleuren aankondigen

Deze functie gebruikt de camera van de MiniVision2+ om de kleur van het object waarop u richt aan te kondigen. De kleur wordt elke seconde herhaald of wanneer de kleur verandert.

Tip: Richt de camera op een afstand van 10-15 cm van het object, in een goed verlichte omgeving.

MiniVision2+ kan de volgende kleuren detecteren:

Rood, Bourgondië, Bruin, Oranje, Geel, Geelgroen, Groen, Smaragd, Turquoise, Blauw, Ultramarijn, Paars, Fuchsia, Roze, Wit, Grijs, Zwart.

Soms wordt extra informatie over de tint toegevoegd: licht, donker, zeer donker, bleek.

Kleur vinden

Deze functie gebruikt de camera om een specifieke kleur te vinden.

Selecteer de gewenste kleur met **Omhoog/Omlaag** → **OK**, richt de achtercamera op het object.

Een geluidssignaal wordt uitgegeven wanneer de kleur wordt gedetecteerd.

Het waarschuwingssignaal kan worden aangepast via de derde optie van de applicatie:

"Waarschuwing om kleur te vinden".

Waarschuwing om kleur te vinden

Wijzig het type melding bij gebruik van **Kleur vinden**. Drie opties zijn beschikbaar:

- **Geluid**: er klinkt een hoorbaar signaal wanneer de kleur wordt gedetecteerd.
- **Trilling**: de telefoon trilt wanneer de kleur wordt gedetecteerd.
- **Geluid en Trilling**: er klinkt een geluidssignaal en de telefoon trilt bij detectie van de kleur.



Artikel 18: Bankbiljetherkenner Introductie

De Bankbiljetherkenner-applicatie stelt u in staat om de camera van de MiniVision2+ te gebruiken om de waarde van uw bankbiljetten te identificeren.

Gegevens bijwerken

Kapsys werkt regelmatig de bankbiljetdatabase bij. Bij het opstarten van de applicatie kan een updatevenster verschijnen.

Selecteer **OK** met de **Omhoog/Omlaag**-knoppen en bevestig met de **OK**-knop om de nieuwste gegevens voor bankbiljetherkenning te installeren. Dit verbetert het detectieproces.

Een bankbiljet identificeren

Om de detectie te optimaliseren, wordt geadviseerd het bankbiljet volledig uit te vouwen en plat op een oppervlak te leggen. Positioneer de telefoon op 20 tot 30 cm afstand in een voldoende verlichte omgeving.

Wanneer de camera van de MiniVision2+ een bankbiljet detecteert, wordt de waarde automatisch aangekondigd en op het scherm weergegeven. Het is mogelijk meerdere bankbiljetten achter elkaar te identificeren.

Artikel 19: Rekenmachine Introductie

De Rekenmachine-applicatie stelt u in staat eenvoudige berekeningen uit te voeren met het numerieke toetsenbord van de MiniVision2+.

Een berekening uitvoeren

Gebruik de verschillende toetsen op het numerieke toetsenbord om cijfers en bewerkingen in te voeren:

- **Toetsen 0–9:** voeren cijfers in
- **Ster-toets (*):** voert een bewerking in uit de lijst: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, punt, komma
- **Hekje (#) en OK-knop:** bevestigen de invoer
- **Back-knop:** verwijdert het laatst ingevoerde cijfer of bewerkingsteken

De **Menu-knop** opent een scherm met de functie "Verwijderen" om het invoerveld te resetten.

Goed om te weten: Nadat de berekening is bevestigd, kunt u met **Omhoog/Omlaag** het resultaat laten herhalen. U kunt ook een nieuwe berekening maken op basis van het resultaat door een nieuwe bewerking en een nieuw getal in te voeren.

Artikel 20: Stemrecorder Introductie



De Stemrecorder-applicatie stelt u in staat audio op te nemen, zoals spraaknotities, en deze later af te luisteren.

Een spraaknotitie opnemen

Selecteer **Nieuwe spraaknotitie** met **Omhoog/Omlaag** vanaf het hoofdscherm van de applicatie en bevestig met **OK**.

Na het derde piepje begint de opname. Spreek dicht bij de microfoon aan de onderkant van de MiniVision2+, links van de USB-poort.

Tijdens de opname zijn de volgende toetsen beschikbaar:

- **Omhoog/Omlaag:** herhaalt de huidige duur van de spraaknotitie
- **Back-knop:** annuleert de opname
- **OK-knop:** pauzeert de opname. Twee opties verschijnen:
 - **Opslaan:** stopt de opname en slaat deze op
 - **Doorgaan:** hervat de opname

Na het opslaan keert u terug naar het hoofdscherm van de stemrecorder. De spraaknotitie is beschikbaar in de **Lijst van spraaknotities**.

Goed om te weten: Als u een SD-kaart in de MiniVision2+ plaatst, wordt de spraaknotitie automatisch daarop opgeslagen.

Goed om te weten: De spraaknotitie wordt opgeslagen in de map **Audio** van het interne geheugen van de MiniVision2+.

Een spraaknotitie afspelen

Gebruik **Omhoog/Omlaag** om **Lijst van spraaknotities** te selecteren en bevestig met **OK**.

De notities zijn gesorteerd op chronologische volgorde van aanmaak, meest recent bovenaan. Elk bericht heeft het formaat: Jaar – Maand – Dag – Uur – Minuut – Seconde.

Selecteer een notitie en druk op **OK** om de opties te openen. Kies **Afspelen** en bevestig met **OK**. Druk op **Back** om het afspelen te stoppen of wacht tot het einde van de opname.

Goed om te weten: Extra informatie over een spraaknotitie is beschikbaar via **Details**: naam, datum en duur.

Een spraaknotitie hernoemen

Selecteer in de **Lijst van spraaknotities** de notitie, druk op **OK**, kies **Hernoemen**, voer de nieuwe naam in en bevestig met **OK**. De wijzigingen worden opgeslagen.

Een spraaknotitie verwijderen

Selecteer een spraaknotitie, druk op **OK**, kies **Verwijderen** en bevestig met **OK**.

Een bevestigingsscherm verschijnt: kies **Ja** om te verwijderen, **Nee** om te annuleren.



Artikel 21: Zaklamp

De Zaklamp-applicatie stelt u in staat de LED van de MiniVision2+ te gebruiken om licht te geven.

Wanneer u de zaklamp-applicatie start, gaat de LED aan de achterkant automatisch aan.
Druk op de **OK-knop** om de LED aan of uit te zetten. Bij het verlaten van de applicatie gaat de LED automatisch uit.

Goed om te weten: De LED gaat automatisch uit wanneer de telefoon in de slaapstand gaat of wanneer u een oproep beantwoordt.

Artikel 22: Weer Introductie

De Weer-applicatie stelt u in staat automatisch weerberichten te ontvangen voor de stad die het dichtst bij uw huidige locatie ligt.

Deze applicatie vereist een internetverbinding (Wi-Fi of 3G/4G via uw mobiele provider)

Het weer bekijken

Bij het openen van de Weer-applicatie geeft MiniVision2+ de weersinformatie van de huidige dag.
Gebruik **Omhoog/Omlaag** om de weersvoorspelling voor de volgende dagen te bekijken (tot 5 dagen).

Elke weersvoorspelling wordt aangekondigd in het volgende formaat: **aankondiging van de dag – staat van de lucht – temperatuur – windsnelheid.**

Goed om te weten: Standaard wordt de temperatuur in graden Celsius weergegeven en de windsnelheid in kilometers per uur.

U kunt via de **Menu-knop** en **Omhoog/Omlaag** “Imperial” selecteren om de temperatuur in graden Fahrenheit en de windsnelheid in mijl per uur te laten aankondigen.

Detail van het weer op een gekozen dag bekijken

Selecteer in het hoofdscherm van de Weer-applicatie de dag waarvoor u de details wilt zien en bevestig met **OK**.

Het detail van de weersvoorspelling opent in een nieuw venster.

Gebruik **Omhoog/Omlaag** om de weersinformatie voor de vier perioden van de dag te bekijken: ochtend, middag, avond, nacht.

Elke periode wordt weergegeven in het volgende formaat: **aankondiging van de periode – staat van de lucht – temperatuur – windsnelheid – windrichting – druk – vochtigheid – bewolking.**

Artikel 23: Noodfunctie Introductie



De MiniVision2+ is uitgerust met een Noodfunctie waarmee u oproepen kunt plaatsen of geolocaliseerde noodberichten kunt verzenden naar vooraf gedefinieerde contacten (tot 10).

Let op: Kapsys kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door een storing van de Noodfunctie door een technisch probleem van het product of onbeschikbaarheid van het netwerk.

Noodfunctie in- of uitschakelen

Met de Nood-applicatie kunt u het “automatisch” verzenden van een alarm in de vorm van een oproep, een bericht of beide plannen naar één of meerdere personen die u heeft gekozen.

- **Proces starten:** Houd de **SOS-knop** 5 seconden ingedrukt.
- **Proces stoppen:** Houd de **SOS-knop** 5 seconden ingedrukt.

Goed om te weten: Bij het inschakelen van de Noodfunctie verschijnt een waarschuwingsscherm.

Noodfunctie instellen

Voor gebruik van de Noodfunctie moet u de instellingen van de applicatie definiëren:

- **Noodknop:** schakelt de activering van de Noodfunctie via de SOS-knop in of uit. Standaard uitgeschakeld.
- **Activeringsvertraging:** stelt de drukvertraging in waarna het noodproces wordt geactiveerd. Twee opties: 3 of 5 seconden. Standaard 5 seconden.
- **Alarm afspelen:** schakelt een krachtig hoorbaar signaal in bij activering van de Noodfunctie. Standaard uitgeschakeld.
- **Telefoonnummers instellen:** definieer telefoonnummers van personen die u wilt bellen of een bericht wilt sturen in geval van nood (max. 10).
 - **Van contactlijst:** selecteer een contact uit uw lijst.
 - **Telefoonnummer instellen:** voer handmatig een telefoonnummer in.
- **Telefoongesprek:** schakelt het bellen van uw noodnummers in bij activering van de Noodfunctie. Personen worden één voor één gebeld in de volgorde van de lijst. Standaard uitgeschakeld.
- **Antwoordvertraging:** stelt de wachttijd in voor het volgende nummer als de oproep onbeantwoord blijft (15, 30 of 45 seconden). Standaard 30 seconden.
- **Bericht verzenden:** plan het verzenden van een SMS bij activering van de Noodfunctie. Alle personen in de lijst ontvangen het bericht. Standaard uitgeschakeld.
 - **Locatie verzenden:** voegt uw geografische positie toe aan het bericht indien beschikbaar.
 - **Berichttekst:** pas de tekst van het noodbericht aan. Standaard: “EMERGENCY MESSAGE”.

Artikel 24: Waar ben ik?

Deze applicatie laat u uw huidige geografische positie zien door de gegevens van GPS, Wifi en mobiele data van de MiniVision2+ te combineren.



Het lokalisatieproces kan enkele seconden duren. Snellere locatiebepaling is mogelijk bij goede netwerkdekking en ingeschakelde Wifi.

- **OK-knop kort indrukken:** ververs uw huidige positie.

Goed om te weten: De aangekondigde locatie is een schatting gebaseerd op beschikbare netwerkgegevens. Kapsys is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden.

Goed om te weten: Intensief gebruik van de "Waar ben ik?"-applicatie kan leiden tot een snellere batterijafname. Verlaat de applicatie met **Back** wanneer u deze niet meer gebruikt.

Artikel 25: Handleiding

Deze applicatie stelt u in staat de handleiding van de MiniVision2+ direct via spraak op uw telefoon te raadplegen.

Bij het openen van de applicatie heeft u drie keuzes:

- **Start:** start het voorlezen van de handleiding. Als u eerder de handleiding heeft gelezen, keert MiniVision2+ terug naar het punt waar u bent gebleven.
- **Hoofdstukken:** stelt u in staat een specifiek hoofdstuk te selecteren en daar het lezen te starten.
- **Controleer update:** laat u de nieuwste versie van de handleiding downloaden via uw internetverbinding.

Tijdens het lezen van de handleiding kunt u met **Omhoog/Omlaag** door de hoofdstukken navigeren. De **OK-knop** wordt gebruikt om het voorlezen te pauzeren of te hervatten.

Goed om te weten: De **Menu-knop** laat u het navigatieniveau van de **Omhoog/Omlaag**-knoppen instellen. Drie keuzes zijn beschikbaar: "Per zin", "Per alinea" en "Per hoofdstuk". Standaard is "Per hoofdstuk" geselecteerd.

Artikel 26: Instellingen Introductie

Deze applicatie laat u bepaalde functies activeren of de bestaande instellingen van de telefoon wijzigen.

MiniVision2+ wordt geleverd met verschillende vooraf ingestelde instellingen die aanpasbaar zijn, zoals tijd, taal, schermweergave, enz.

De instellingen zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

Schermb

Deze categorie omvat instellingen die te maken hebben met het gebruik van het scherm:

- **Helderheid:** past het helderheidsniveau van het scherm aan. Vijf niveaus beschikbaar: "Zeer laag", "Laag", "Gemiddeld", "Hoog", "Maximaal". Standaard: "Gemiddeld".



- **Slaapstand vertraging:** stelt in na hoeveel tijd het scherm in slaapstand gaat. Zeven opties: 15 sec, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min. Standaard: 1 minuut.
- **Lettertype:** stel het lettertype van de tekst op het scherm in. Vijf opties: "Standaard", "Open Dyslexic", "Condensed", "Times", "Luciole". Standaard: "Standaard".
- **Lettergrootte:** vier opties: "Klein" (5 regels), "Medium" (4 regels), "Groot" (3 regels), "Zeer groot" (2 regels). Standaard: "Klein".
- **Vet:** maakt de tekst vet. Standaard uit.
- **Tekst- en achtergrondkleur:** zes contrasten: "Wit op zwart", "Zwart op wit", "Blauw op geel", "Geel op blauw", "Geel op zwart", "Zwart op geel". Standaard: "Wit op zwart".
- **Scrollsnelheid tekst:** vijf snelheden: "Zeer langzaam", "Langzaam", "Normaal", "Snel", "Zeer snel". Standaard: "Normaal".
- **Scrollvertraging tekst:** zes opties: 0,25 sec, 0,5 sec, 1 sec, 2 sec, 3 sec, 4 sec. Standaard: 1 sec.
- **Weergavemodus:** drie modi: Alleen tekst (standaard), Alleen pictogram, Tekst + pictogram.
- **Scherf uit:** zwart scherm voor privacy en batterijbesparing. Standaard uit. Alleen beschikbaar als schermlezer actief is.

Vocalisatie

Instellingen voor spraakuitvoer:

- **Scherflezzer:** aan/uit. Standaard aan.
- **Stemselectie:** kies de spraak van MiniVision2+. Voorbeeld wordt afgespeeld.
- **Snelheid spraak:** negen niveaus: zeer langzaam tot snelst. Standaard: normaal.
- **Wake up speech:** aankondiging bij inschakelen scherm, maximaal 9 items. Standaard: batterijniveau, gemiste oproepen, nieuwe berichten, software-updates.
- **Editor echo:** vier opties: geen echo, karakter per karakter, woord per woord, karakter + woord. Standaard: karakter per karakter.
- **Positie in lijst aankondigen:** geeft positie van geselecteerd item in lijst aan. Standaard uit.
- **Geluid bij camera of LED:** waarschuwingsgeluid wanneer camera/LED actief is.

Bluetooth

Instellingen en beheer van Bluetooth:

- **Bluetooth in-/uitschakelen**
- **Gekoppelde apparaten:** status bekijken, ontkoppelen
- **Apparaten zoeken:** apparaten in de buurt scannen, koppelen
- **Naam wijzigen:** Bluetooth-naam van MiniVision2+ aanpassen

Goed om te weten: Schakel Bluetooth uit als u het niet gebruikt om batterij te besparen.

Wi-Fi

Instellingen voor Wi-Fi:

- **Status:** naam verbonden router



Worldwide Vision

— see things different —

- **Bekende netwerken:** verbinden/ontkoppelen, vergeten
- **Netwerken scannen:** verbinding maken met nieuw netwerk
- **Voice over Wi-Fi (VoWiFi):** oproepen via Wi-Fi bij slechte mobiele dekking

Goed om te weten: MiniVision2+ ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi.

Netwerk

- **Vliegtuigmodus:** alle radiosignalen uit
- **Mobiele data:** in-/uitschakelen
- **Data roaming:** in-/uitschakelen in buitenland
- **4G-oproep:** in-/uitschakelen (controleer beschikbaarheid bij provider)
- **APN reset:** reset toegangspunten

Beveiliging

- **SIM-kaart vergrendeling:** in-/uitschakelen, PIN wijzigen
- **Telefoon vergrendeling:** geen, code (4 cijfers), toetsenbord (houd ster ingedrukt)
- **Wachtwoorden tonen:** PIN en vergrendelingscode zichtbaar en uitgesproken. Standaard aan

Taal

Stel de systeemtaal en spraaksynthese in. Bevestig met OK.

Toetsenbord

- **Trilfeedback:** in-/uitschakelen
- **Geluid feedback:** in-/uitschakelen
- **Tril bij invoer:** in-/uitschakelen
- **Geluid bij invoer:** in-/uitschakelen
- **Vertraging invoer validatie:** 0,3 – 3 sec
- **Oproep opnemen met toetsen 0-9:** aan/uit
- **Snelle toegang:** applicatie/contact koppelen aan numerieke toets
- **Toetsenbordverlichting:** automatisch, altijd aan, altijd uit

Datum & tijd

- **Automatisch datum & tijd:** in-/uitschakelen
- **Datum instellen:** handmatig jaar, maand, dag
- **Tijd instellen:** handmatig uur, minuten
- **24-uurs formaat:** in-/uitschakelen
- **Tijdzone:** automatisch of handmatig

Over telefoon

- **Systeemupdates:** update software via internet



- **Status:** batterijniveau, serienummer, IMEI, Bluetooth, Wi-Fi MAC, SIM-status, netwerk, signaalsterkte, mobiel netwerk, roaming, eigen nummer
- **Modelnummer:** naam van het toestel
- **Custom softwareversie:** versie van MiniVision2+ software

Artikel 27: Technische specificaties Ontwerp

- Afmetingen: 125 x 60 x 13,5 mm
- Gewicht: 103 g
- Scherm: 2,3" / QVGA (240 x 320 pixels)

Hardware

- **Processor:** Quad Core @ 1,5 GHz
- **Intern geheugen:** RAM 512 MB, Flash 4 GB
 - RAM 1 GB, Flash 8 GB
- **Extern geheugen:** SD-kaart, tot 32 GB
- **Mobiele connectiviteit:** 4G / 3G / 2G
- **Draadloze connectiviteit:** Wi-Fi 802.11 (2,4 GHz b/g/n) en Bluetooth 4.2
- **SIM-kaart formaat:** single Nano SIM
- **Aansluitingen:** audio jack 3,5 mm
- **Stroomverbruik:**
 - Batterij: 1600 mAh Li-ion
 - Standby tijd: 200 uur
 - Gesprekstijd: 7 uur
- **SAR-waarden:**
 - Hoofd: 0,563 W/kg
 - Lichaam: 1,577 W/kg
 - Ledematen: 1,997 W/kg
- **LED-flitser en camera:** 2 MP
- **HAC:** M3/T3
- **Beltonen en trilfunctie**

Artikel 28: Bij problemen Introductie

Lees deze aanbevelingen voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- Schakel de telefoon regelmatig uit om de prestaties te optimaliseren.
- Laad de batterij volledig op en voer controles uit voor een optimaal gebruik.

Mijn telefoon gaat niet aan / zwart scherm

- Houd de **Einde oproep-knop** ingedrukt totdat het scherm aangaat.
- Controleer de batterijstatus.
- Controleer de batterijcontacten, verwijder en plaats de batterij opnieuw en zet de telefoon aan.



Worldwide Vision

— see things different —

De leesbaarheid van mijn scherm is niet bevredigend

- Reinig het scherm.
- Pas de helderheid aan aan uw omgeving.

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Druk op de **Einde oproep-knop** om de telefoon te wekken.
- Controleer de batterijstatus.

Mijn telefoon heeft een lege batterij

- Zorg dat u de batterij volledig heeft opgeladen (minimaal 4 uur).
- Schakel Wi-Fi en Bluetooth uit als u deze niet nodig heeft.
- Verlaag de helderheid van het scherm of schakel het scherm permanent uit via “Scherm uit”.

Mijn telefoon laadt niet goed op

- Controleer of de batterij niet volledig leeg is.
- Controleer dat het opladen plaatsvindt onder normale condities (0°C – 40°C).
- Plaats de batterij correct voordat u de lader aansluit.
- Gebruik de bijgeleverde KAPSYS-lader en batterij.
- Controleer compatibiliteit van stopcontacten in het buitenland.

Mijn telefoon is niet verbonden met een netwerk

- Probeer op een andere locatie.
- Controleer de netwerkdekking bij uw provider.
- Zorg dat vliegtuigmodus uit staat.
- Controleer of uw SIM-kaart geldig is.
- Probeer later opnieuw (mogelijke netwerkovertuiging).
- Verwijder en plaats de SIM-kaart opnieuw.

SIM-kaartfout / geen telefoonfunctie beschikbaar

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst.
- Controleer of de chip niet beschadigd of bekrast is.

Ik kan geen telefoonoproep maken

- Controleer of het nummer correct is.
- Controleer land-/netnummer bij internationale oproepen.
- Zorg dat uw telefoon verbonden is met een netwerk.
- Controleer vliegtuigmodus.
- Controleer bij buitenlandse oproepen uw abonnement voor internationale diensten.

Ik kan geen oproepen ontvangen



Worldwide Vision

— see things different —

- Controleer dat de telefoon aanstaat en verbonden is met een netwerk.
- Controleer vliegtuigmodus.

De geluidskwaliteit is niet optimaal

- Pas het volume aan tijdens een gesprek met **Links/Rechts**.
- Controleer GSM-ontvangst met **# + 1**.

Nummer wordt niet gebeld uit contactlijst

- Controleer of het nummer correct is opgeslagen.
- Voeg landcode toe bij buitenlandse oproepen.

Mijn bellers kunnen geen bericht achterlaten

- Controleer beschikbaarheid van voicemail bij uw provider.

Ik kan geen voicemail openen

- Controleer of het voicemailnummer correct is ingevoerd.
- Probeer later opnieuw.

SIM-kaart geblokkeerd

- Onjuiste PIN 3x ingevoerd, neem contact op met uw provider voor PUK-code.

Hoe reset ik mijn telefoon

Bij volledige blokkering van het toestel is het mogelijk bepaalde instellingen te resetten via de toetsen van het fysieke toetsenbord:

- ***#111#** : herstelt toegankelijkheidsinstellingen naar standaardwaarden
- ***#333#** : complete systeemreset (verwijdert alle persoonlijke gegevens: contacten, notities, berichten, evenementen, Wi-Fi, enz.)
- ***#444#** : toegang tot "Access Point Name" instellingen
- ***#555#** : directe toegang tot scherm voor wijzigen van systeemtaal

Artikel 29: Over dit document

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KAPSYS behoudt zich het recht voor om inhoud aan te passen zonder verplichting tot informeren.

KAPSYS is niet aansprakelijk voor technische fouten, redactionele fouten of incidentele schade door gebruik van dit document.

Het product voldoet aan CE-eisen voor residentieel, commercieel of lichte industriële omgevingen.

Langdurig gebruik van de speler op maximaal volume kan gehoorbeschadiging veroorzaken.



Artikel 30: Juridische kennisgeving en garantie Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen

- Ga zorgvuldig om met uw telefoon en accessoires: niet laten vallen of zwaar laten stoten.
- Demonteer het product niet; dit vervalt de garantie en kan het toestel onbruikbaar maken.
- Reinig alleen met een zachte, droge doek; gebruik geen chemicaliën, schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Dit product is niet waterdicht; bescherm het tegen vocht en vloeistoffen.
- Gebruik het product niet bij warmtebronnen en bewaar het niet op warme, vochtige of corrosieve plekken.
- Gebruik het product niet in de buurt van magnetische velden.
- Gebruik het product niet als het scherm gebroken is om letsel te voorkomen.
- Gebruik het product niet in explosieve omgevingen.
- Gebruik het product niet in gezondheidsinstellingen zonder toestemming van bevoegd personeel.
- Laad de telefoon niet op bij temperaturen $<0^{\circ}\text{C}$ of $>45^{\circ}\text{C}$.
- Gebruik het product niet bij extreem hoge of lage temperaturen:
 - Gebruiksbereik: -10°C tot $+55^{\circ}\text{C}$
 - Korte opslag: -20°C tot $+60^{\circ}\text{C}$
 - Lange opslag: -10°C tot $+25^{\circ}\text{C}$
- Bij langdurig gebruik kan het toestel warm worden.
- Schakel het toestel periodiek uit en verwijder de batterij voor optimale prestaties.

Gezondheid en veiligheid

- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Houd tijdens autorijden uw handen vrij; volg verkeersregels.
- Bescherm uw gehoor: beperk langdurig gebruik van oortjes of luidsprekers op hoog volume.
- Raadpleeg een arts of implantaatfabrikant bij medische implantaten (pacemaker).
- Radio-uitzendingen kunnen de werking van onvoldoende beschermde medische apparatuur beïnvloeden.

Garantie

Neem bij een storing contact op met uw leverancier.

Geen garantie wordt verleend in de volgende gevallen:

- Normale slijtage, verminderde batterijcapaciteit
- Beschadiging door verkeerd gebruik, vocht, warmte, stoten of breuken
- Niet-naleving van gebruiksvorschriften, ongelukken, nalatigheid, commercieel gebruik
- Kortsluiting van de batterij of gebruik in een ander toestel
- Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires of connectoren
- Reparaties door onbevoegden

Het wordt aangeraden regelmatig een back-up van uw gegevens te maken; verlies hiervan valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Storingen met netwerkdiensten vallen buiten de garantie; neem contact op met uw provider.



Specifieke Absorptiesnelheid (SAR)

- SAR-limiet USA (FCC): 1,6 W/kg (gemiddeld over 1 gram weefsel)
- MiniVision2+ gemeten waarden:
 - Hoofd: 1,775 W/kg
 - Lichaam: 1,855 W/kg
 - Ledematen: 3,078 W/kg
- Houd het toestel minstens 10 mm van het lichaam bij gebruik. Gebruik alleen accessoires die deze afstand waarborgen.

Klantenservice

- Neem contact op met uw leverancier of:
KAPSYS Customer Service – 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Parc Haute Technologie
– Lot 8, 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, Frankrijk
Website: www.kapsys.com

Handelsmerken

- Namen en logo's in dit document zijn handelsmerken van de respectieve eigenaars.
- KAPSYS woorden, logo's en merken zijn eigendom van KAPSYS SAS.
- Bluetooth is geregistreerd merk van Bluetooth SIG Inc.
- Nuance is geregistreerd merk van Nuance Corporation Inc.

Artikel 31: Index – Navigatiepaneeltoetsen

Toets	Actie
Kort indrukken Oproep	Beantwoord inkomende oproep / open telefoonapplicatie
Lang indrukken Oproep	Open belgeschiedenis
Kort indrukken Einde oproep	Terug naar startscherm / oproep beëindigen / slaapmodus activeren/verlaten
Lang indrukken Einde oproep	Aan/uit zetten van MiniVision2+
Kort indrukken Omhoog	Vorig item
Kort indrukken Omlaag	Volgend item
Lang indrukken Omhoog	Eerste item in lijst
Lang indrukken Omlaag	Laatste item in lijst
Kort indrukken Links	Volume verminderen / cursor naar links
Kort indrukken Rechts	Volume verhogen / cursor naar rechts



Toets	Actie
Kort indrukken OK	Activeren / bevestigen
Lang indrukken OK	Spraakherkenning activeren (dictatiemodus)
Kort indrukken Terug	Vorig scherm / laatste teken verwijderen
Lang indrukken Terug	Hele invoer wissen
Kort indrukken Menu	Opties van het huidige scherm openen

Artikel 32: Index – Alfanumerieke toetsen

Toets	Actie (rollend)
1	1 . ? ! @ - _ , ' " () / : ; + & % * = < > € £ \$ ¥ ¤ \ [] { } ~ ^ ` i \$
2	a b c 2 A B C
3	d e f 3 D E F
4	g h i 4 G H I
5	j k l 5 J K L
6	m n o 6 M N O
7	p q r s 7 P Q R S
8	t u v 8 T U V
9	w x y z 9 W X Y Z
0	Spatie, 0, nieuwe regel
Ster	Toetsenbord vergrendelen (Normaal / Shift / Numeriek)
Hekje (#) 1e druk: lijst speciale tekens, 2e druk: emoticons	

Artikel 33: Index – Toegankelijkheidssneltoetsen

Sneltoets	Actie
# + 1	Telefoonstatus: tijd, batterij, netwerk, Wi-Fi, Bluetooth
# + 2	Lees alle items één voor één vanaf boven
# + 3	“Scherm uit”-functie aan/uit
# + 4	Spreek snelheid verlagen



Sneltoets	Actie
# + 5	Spreek snelheid verhogen
# + 6	Niet toegewezen
# + 7	Laatste uitgesproken item herhalen
# + 8	Laatste item spellen (letter voor letter)
# + 9	Niet toegewezen
# + 0	Telefooninstellingen openen
# + Omhoog	Niet toegewezen
# + Omlaag	Niet toegewezen
# + Links	Beltoonprofiel op Stil (volume 0/7)
# + Rechts	Beltoonprofiel op Buiten (volume 7/7)

Artikel 34: Index – Sneltoetsen in bewerkvelden

De onderstaande tabel toont de verschillende sneltoetsen die beschikbaar zijn in de invoervelden voor het schrijven van tekst:

Sneltoets	Actie
Ster (*) + 1	Niet toegewezen
Ster (*) + 2	Niet toegewezen
Ster (*) + 3	Geselecteerde tekst knippen
Ster (*) + 4	Niet toegewezen
Ster (*) + 5	Niet toegewezen
Ster (*) + 6	Geselecteerde tekst kopiëren
Ster (*) + 7	Niet toegewezen
Ster (*) + 8	Niet toegewezen
Ster (*) + 9	Geselecteerde tekst plakken
Ster (*) + 0	Niet toegewezen
Ster (*) + Omhoog	Niet toegewezen



Worldwide Vision

— see things different —

Sneltoets

Actie

Ster (*) + Omlaag	Niet toegewezen
Ster (*) + Links	Selecteer het teken links van de cursor (herhaaldelijk te gebruiken om een deel van de tekst te selecteren, bijvoorbeeld een heel woord of zin)
Ster (*) + Rechts	Selecteer het teken rechts van de cursor (herhaaldelijk te gebruiken om een deel van de tekst te selecteren, bijvoorbeeld een heel woord of zin)