



Worldwide Vision
— see things different —

Art. RN10127

VLOEISTOFNIVEAU-INDICATOR DK 127

Handleiding

Deze vloeistofniveau-indicator is alleen bedoeld voor huiselijke omstandigheden, om aan te geven dat het vloeistofniveau in een glas, kopje of iets dergelijks hoog genoeg is. Het is alleen bedoeld voor het meten van vloeistoffen voor menselijke consumptie.

De vloeistofniveau-indicator kan twee verschillende niveaus meten: Als een glas gevuld wordt, geeft de indicator een onderbroken akoestisch signaal en een onderbroken trilsignaal, ten teken dat het glas bijna vol is. Als u verder schenkt en het glas is helemaal vol, dan voelt u een doorlopend trilsignaal en u hoort een snelle reeks pieptonen.

De indicator is niet verstelbaar en we adviseren u, de plastic bescherming van de metalen voelers niet te verwijderen of te beschadigen. Dit zal negatieve gevolgen voor de meetresultaten hebben.

Batterij: knoopcel CR-2032

levensduur batterij: ongeveer een jaar (bij gebruik voor ongeveer 6 koppen per dag)

Gebruiksaanwijzing:

Hang de indicator over de rand van een glas of kop, met het batterijgedeelte (het grootste) aan de buitenkant. Schenk vloeistof in tot u eerst het onderbroken signaal en daarna het snellere, onderbroken signaal hoort en het continu trilsignaal voelt.

Haal de indicator weg. Mocht het signaal nog blijven klinken, schudt de indicator dan zachtjes af om druppels te verwijderen.

Als de indicator niet in gebruik is, houd hem dan droog en uit de buurt van metalen voorwerpen om de batterij niet te belasten.

Schoonmaken:

De vloeistofniveau-indicator is waterafstotend en kan daarom schoon gewreven worden of met een vochtige doek worden schoongemaakt.

Batterij vervangen:

1. Zorg dat de metalen voelers naar beneden wijzen
2. Aan de onderkant van de indicator voelt u een inkeping, ongeveer de vorm van een halve cirkel, waar u met uw nagel het plastic kapje naar beneden kunt trekken.
3. De muntvormige batterij bevindt zich aan de binnenkant.
4. Verwijder de batterij door het uit zijn behuizing te trekken.
5. Schuif de nieuwe batterij er voorzichtig in, indien de indicator niet werkt draai de batterij dan om.
6. Doe het kapje er weer op en de indicator is weer klaar voor gebruik.

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 52 85 666

E Info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl