



Worldwide Vision
— see things different —

Art: WV247790
AUDIOLINE TELEFLASH

Bij deze gebruiksaanwijzing is uitgegaan van het feit dat u de Teleflash voor u houdt met de lichtbol naar boven en de keuzeschakelaars naar u toe gericht.

Om uw Teleflash in gebruik te nemen, dient u de netadapter in het stopcontact te steken, en de andere kant van het snoer in de “12V” aansluitbus van de Teleflash, die zich aan de linker zijkant bevindt.

Bevestig de plug van de witte, 5 meter lange kabel in de sensor aansluitbus van de Teleflash, die zich aan de rechter zijkant bevindt.

Aan het andere uiteinde bevindt zich een sensor dat geplaatst dient te worden op het telefoontoestel, zo dicht mogelijk bij de bel. Meestal is dit aan de onderkant van het toestel.

Om te testen of de sensor op de meest ideale plaats wordt aangesloten kunt u zich het beste laten bellen en de sensor op verschillende plaatsen proberen.

Let erop dat bij het bevestigen van de sensor de kleine opening in het midden niet afgedekt wordt door de zelfklevende tape.

KEUZESCHAKELAARS

Op de voorkant, onder de rand van de Teleflash kunt u het belvolume regelen.

Op de bovenzijde kunt u met de rechter schakelaar een keuze maken tussen: bovenste stand = alleen licht, middelste stand = alleen geluid en onderste stand is licht en geluid.

Met de linker schakelaar aan de bovenzijde kunt u een keuze maken tussen: bovenste stand = Teleflash aan en onderste stand = Teleflash uit.

Worldwide Vision
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
T 013 528 56 66
E info@worldwidevision.nl

