



Worldwide Vision
— see things different —

Art: 610101

**SENSEWORKS NEDERLANDSSPREKENDE
ALARMKLOK/WEKKER MET EXTRA GROTE DRUKKNOP**

Handleiding

Inhoudsopgave

1. [Inhoud van de verpakking](#)
2. [Knoppenbeschrijving](#)
3. [Uitspraak van tijd en datum](#)
4. [Instellen van de tijd](#)
5. [Instellen van de datum](#)
6. [Instellen van het alarm](#)
7. [Alarm instellen aan/uit](#)
8. [Volume aanpassen](#)
9. [Reiniging en verzorging](#)
10. [Afvalverwerking](#)

1. Inhoud van de verpakking


- SenseWorks alarmklok/wekker met extra grote drukknop
- Handleiding

2. Knoppenbeschrijving

Op de gehele bovenkant van de klok bevindt zich de extra grote drukknop (S1) voor de spraak.

Op de onderkant van de alarmklok vindt u de menuknop (S2) om de tijd, datum en alarm in te stellen, een volumeschakelaar (S3) HI/LO en het batterijklepje. Om de batterijen te plaatsen opent u het batterijklepje en plaatst u 3 AAA batterijen (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat de juiste polen van de batterijen naar de juiste kant worden geplaatst, plaats dan het klepje

terug, zodat het batterijvakje gesloten is.

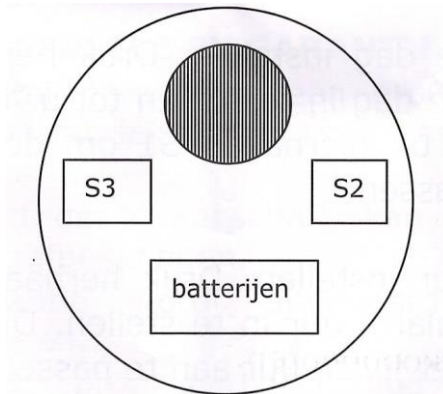

3. Uitspraak van tijd en datum

Druk éénmaal op S1 voor uitspraak van de tijd.

Druk tweemaal op S1 voor uitspraak van de datum.

4. Instellen van de tijd

U heeft ongeveer 10 seconden de tijd om een instelling te veranderen. Hierna zal de klok een beepsignaal geven dat het naar de “Beginstand” terug keert.

- Instellen van het uur

Druk eenmaal op S2 om het uur in te stellen, de klok zal herhalen “uren instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 tot het gewenste uur is bereikt.

- Instellen van de minuten

Druk tweemaal op S2 om de minuten in te stellen, de klok zal herhalen “Minuten instellen”. Druk hierna herhaaldelijk op S1 tot de gewenste minuten zijn bereikt.

5. Instellen van de datum

- Jaar instellen

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “jaar instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 om het jaar aan te passen.

- Instellen van de maand

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “maand instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 om de maand aan te passen.

- Instellen van de datum

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “datum instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 om de gewenste datum aan te passen.

6. Instellen van het alarm

- Alarm uren instellen

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “alarm uren instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 om het gewenste uur in te stellen.

- Alarm minuten instellen

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “alarm minuten instellen”, druk hierna herhaaldelijk op S1 om de gewenste minuten in te stellen.

7. Alarm instellen aan/uit

Druk herhaaldelijk op S2 tot de klok herhaalt “alarm instellen”, druk nu op S1 om respectievelijk het alarm aan of uit te zetten. Wanneer het ingestelde alarm afgaat druk op S1 om het alarm uit te schakelen. De volgende dag zal het alarm op hetzelfde tijdstip weer afgaan.

De alarmklok zal terugkeren naar de normale tijdstand, wanneer er 10 seconden geen knop ingedrukt wordt.

8. Volume aanpassen

Gebruik de S3 schuifknop om het volume aan te passen naar hoog of laag.

9. Reiniging en verzorging

Reinig het oppervlak met een licht vochtige doek. Er mag geen vocht in het horloge dringen.

Vermijd in alle geval bijtende of schurende reinigingsmiddelen en kras niet met harde voorwerpen (ook geen schuursponsjes) op het oppervlak.

Garantietermijn: 1 jaar

10. Afvalverwerking

Dit product mag niet als gewoon huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



U bent als eindverbruiker volgens de batterijregelgeving wettelijk verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen; ze wegwerpen als huishoudelijk afval is verboden.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, worden gekenmerkt door bovenstaand symbool (doorstreepte vuilnisbak met zwarte balk eronder), dat op verbod voor behandeling als huishoudafval wijst.

De benamingen voor doorslaggevende zware metalen zijn:

Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (benaming staat op batterij, vb. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

Uw gebruikte batterijen kunt u kosteloos bij de verzamelpunten van uw gemeente, bij onze administratie of overal waar batterijen verkocht worden afgeven.

Daarmee vervult u uw wettelijke plicht en draagt u uw steentje bij tot de bescherming van het milieu.

Voor meer informatie:

Worldwide Vision

Koperslagerij 15

4762 AR Zevenbergen

T 013 528 56 66

E info@worldwidevision.nl

I www.worldwidevision.nl